



Guide de transmission des données DSA FRED EASY G2 SCHILLER



Comment connecter le DSA au réseau :

Câble RJ 45



Connecteur du DSA

1 prise réseau de la caserne, identifiée par le service informatique : toujours garder celle-ci.





Connecter ensemble le câble RJ 45, et le connecteur DSA, puis brancher le câble RJ 45 dans la prise réseau concernée.



Une fois branché, appuyer sur le bouton transmission :



Voici les messages affichés, lors de la transmission :

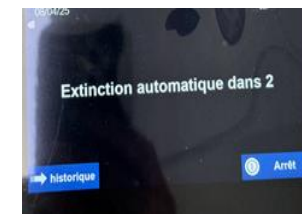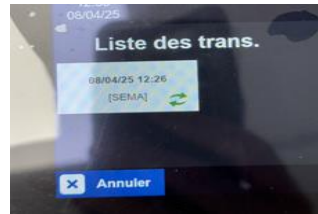

Message d'erreur pouvant apparaître, lors de la transmission:

Si la transmission échoue, le DSA s'éteint. Répéter l'opération de transmission.

En cas d'échec, faire un mail aux 2 adresses génériques suivantes: biomedical26-07@sdis07.fr, et sic@sdis26.fr

