

**Fiche matériel « COLLIER CERVICAL de marque STIFNECK »**  
(à associer à la fiche QPACRE n°8.2 restriction au moyen d'un collier cervical)

VELCRO ROSE = PEDIATRIQUE

VELCRO BLANC = ADULTE



REPERES DE REGLAGE  
TAILLE

**1. Prise de mesure sur tête en position neutre avec les doigts du secouriste-utilisateur**



Les doigts sont en appui sur l'épaule à la base du cou.

Les doigts qui réalisent la prise de mesure doivent rester au plus près de la ligne imaginaire du menton sans la dépasser.


**2. Reporter la mesure sur le collier au niveau des repères de réglages**



Le doigt le plus bas est posé sur la base plastique bleue du collier.

Le doigt le plus haut couvre le repère de réglage à utiliser.

**3. Ajuster la taille du collier puis appuyer sur les deux onglets de verrouillage**

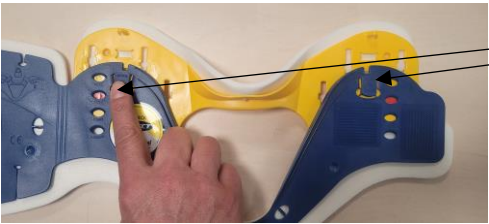

**4. Placer le soutien de menton sous ce dernier. Ajuster correctement le collier autour du cou en maintenant la partie avant en place. Attacher avec le velcro.**



**Toutes les parties du collier doivent être au contact de la victime et ne pas occasionner de douleur.**



Création : FOFO CEAF du SDIS 26