


» SUAP-FM-03 Thermomètre électronique (digital)



Définition / Description

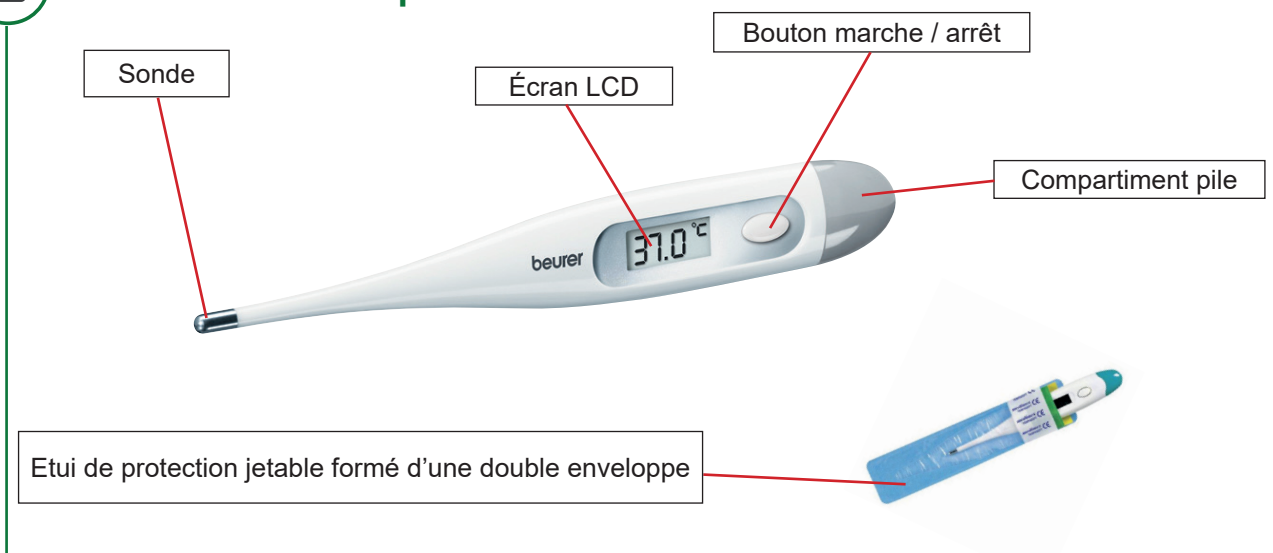

Indication

La mesure de la température est réalisée :

- lorsque la victime semble anormalement chaude ou froide.
- en cas de suspicion de maladies infectieuses.
- en fonction des conditions climatiques (canicule, grand froid...).

La voie buccale et axillaire sont les 2 modes de température retenus pour les sapeurs-pompiers.

Adulte : La voie **buccale est** à privilégier, plus fiable que la voie axillaire . Elle est contre indiquée en cas de détresse respiratoire.

Enfant < 5 ans : la voie buccale n'est pas recommandée (difficulté à maintenir le thermomètre sous la langue). La **voie axillaire** est donc à privilégier.

La voie rectale est la méthode la plus fiable chez l'enfant surtout en cas de convulsions hyperthermiques. Elle reflète le mieux la température centrale. **Elle sera prise par les parents.**



Risques et contraintes

Mauvais positionnement de la sonde = température sous estimée.




Utilisation

- Retirer l'enveloppe extérieure de l'étui de protection.



1 MISE EN MARCHÉ > Appuyer 1 fois sur la touche Marche/Arrêt.

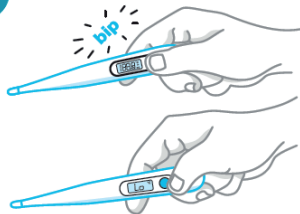

L'écran affiche :

1 188.8 °C M

2 OK °C

3 Lo °C

Le thermomètre est prêt à mesurer




2 PRISE DE TEMPÉRATURE >

Buccale* ou axillaire**




Durant la prise, le C° clignote tant que la température croît.

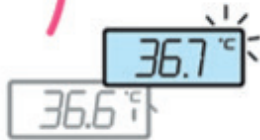

3 LECTURE > Plusieurs bips sonores signalent la fin de la mesure et le C° cesse de clignoter.



(L'appareil s'éteint au bout de 9mn).

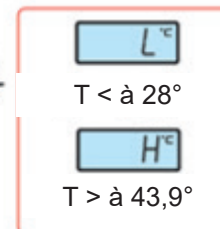


- *Voie buccale : placer le thermomètre sous la langue en maintenant la bouche fermée le temps de la mesure.
- **Voie axillaire : placer le thermomètre au creux de l'aisselle en plaquant le bras contre le thorax.
- Le thermomètre s'arrête automatiquement après 10 minutes. Arrêt manuel possible en appuyant sur le bouton marche/arrêt pour économiser la pile.
- Lire et transmettre **le résultat affiché** au médecin régulateur en précisant la voie utilisée.

Température moyenne
Buccale : 36°6
Axillaire : 36°1

- Retirer la protection du thermomètre et jeter la dans les DASRIA.
- Nettoyer l'extrémité du thermomètre avec une lavette imbibée de produit désinfectant et mettre un étui de protection.

4 CONSULTATION DE LA MÉMOIRE > Appuyer sur la touche Marche/Arrêt sans la relâcher.

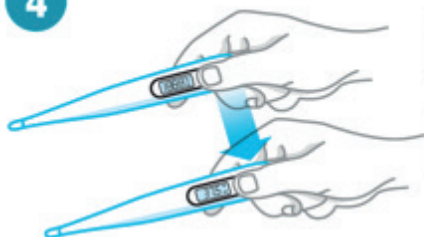


188.8 °C M L'écran affiche d'abord.

37.5 °C M Puis l'écran affiche la dernière température mesurée.



Entretien / Maintenance

- Vérifier régulièrement bon fonctionnement de l'appareil.
- Quand le symbole  apparaît dans le coin droit de l'écran : recommander un nouveau thermomètre à la pharmacie et jeter l'ancien à réception du nouveau (dans un collecteur à matériel électrique)



Points clés

- Respecter la méthode de prise en fonction des indications.
- La sonde doit être correctement placée.
- Utiliser un étui de protection.



Critères d'efficacité

Température compatible avec l'état clinique de la victime.