

SSUAP-FM-46

Sangle relevage victime



Définition / Description

Sangles d'aide au relevage dans l'objectif :

- De préserver le potentiel physique du soignant en favorisant la participation de la personne et en évitant le port de charge.
- De sécuriser le relevage.
- D'améliorer le confort de la victime



Longueur : 116 cm

- Largeur : 20 cm
- 2 poignées par cotés. Résistance à la rupture par poignée : 250 Kg
- 2 sangles par VSAV



Indications

La ou les sangles s'utilisent sous réserve de :

- Absence de traumatisme.
- Capacité à comprendre les consignes.
- Participation possible (même partielle).
- Appui possible sur au moins un membre inférieur.
- Tonus musculaire suffisant pour participer au transfert.



Utilisation

Victime assise sur une chaise



- Glisser la sangle derrière la victime jusqu'au contact de l'assise.
- Fléchir légèrement les jambes.
- Saisir les sangles par les poignées.
- Caler les pieds de la victime avec les pieds du secouriste.
- Inciter la victime à se tenir aux poignées.



- Solliciter la participation de la victime.
- Utiliser la force des cuisses et des bras pour relever la victime.
- Si la corpulence de la victime le nécessite, cette manœuvre peut s'effectuer à 2 secouristes, chaque secouriste se saisissant d'une poignée.

Victime au sol



- Assoir la victime
- Glisser la sangle sous les aisselles de la victime
- Demander à la victime de plier les jambes
- Fléchir légèrement les jambes.
- Saisir les sangles par les poignées.
- Caler les pieds de la victime avec les pieds du secouriste.
- Solliciter la participation de la victime.
- Utiliser la force des cuisses et des bras pour relever la victime.

Variantes

A 2 secouristes



A 3 secouristes



Dégagement d'un milieu exigu



- Passer la sangle sous les aisselles de la victime.
- Faire glisser la victime au sol.



Points clés

- Respecter les préconisations gestes et postures.



Entretien / Maintenance

- Nettoyage avec une lingette et surfanios.
- Trempage possible si nécessaire.
- Rangement du matériel une fois sec.