



FORMATION À L'UTILISATION VISIOLITE®

Formation effectuée par Marjory GUICHARD

m.guichard@fim-medical.com – 06 25 14 58 63



FIM MEDICAL

51, rue Antoine Primat
CS60194
69625 Villeurbanne cedex

04 72 34 89 89

www.fim-medical.com

I- LES TESTS DISPONIBLES

	VISOLITE® Master GT	VISOLITE® Master
TESTS DE BASE		
Lettres (Binoculaire & Monoculaire)	•	•
Nombres (Binoculaire & Monoculaire)	•	•
Anneaux de Landolt (Binoculaire & Monoculaire)	•	•
Grille d'Amsler	•	•
Test d'Hypermétropie	•	•
Reliefs	•	•
Fusion	•	•
Astigmatisme	•	•
Duochrome Rouge / Vert	•	•
Phories Verticales & Horizontales	•	•
Test des Couleurs type Ishihara	•	•
Champ Visuel Horizontal & Vertical	•	•
TESTS COMPLEMENTAIRES		
Champ Visuel Central	•	•
Sensibilité à l'Eblouissement	•	
Résistance à l'Eblouissement	•	
Sensibilité au Contraste	•	•
FONCTIONS		
Vision de Loin	•	•
Vision Intermédiaire	•	•
Vision de Près	•	•
Photopique Haut	•	•
Photopique Bas	•	•
Mésopique (Vision de Nuit)	•	•


II- MISE EN MARCHÉ, ENTRETIEN, MAINTENANCE

- Branchement du bloc alimentation sur le Visiolite® et sur une prise.
- Branchement du cordon USB sur le Visiolite® et sur l'ordinateur.
- Lancement du logiciel Visiolite®.
- Installation du salarié : position assise, dos droit, face à l'appareil qu'il va incliner pour le poser sur son front.
- Après chaque examen, décontaminez les parties en contact direct avec la peau (boîtier, masque, appui frontal) avec des lingettes bactéricides et fongicides de type Bactinyl. Merci de nous contacter pour obtenir la liste des lingettes dont les composants sont compatibles avec nos appareils. Les lentilles se nettoient à l'aide de la chiffonnette livrée avec le Visiolite® uniquement.
- Seul FIM Medical est habilité à effectuer la maintenance que nous vous recommandons d'effectuer annuellement.

III- REALISATION DE L'EXAMEN

Si vous disposez d'une interface avec un logiciel métier, la phase d'identification du salarié est déjà implémentée, vous n'avez plus qu'à lancer l'examen.

Sans interface, cliquez sur l'icône « Nouveau ».

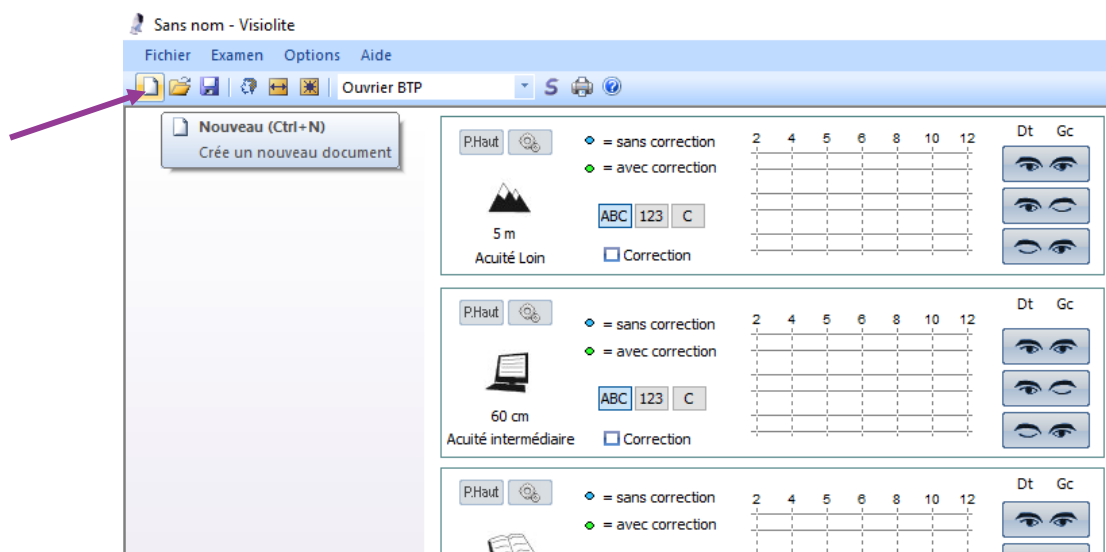

Renseignez les champs obligatoires signalés par l'*

N° Id : obligatoire mais vous choisissez ce que vous souhaitez mettre (une lettre, un n° de sécurité sociale, un numéro de dossier, etc.)

Identification

Nom : * S. ... Entreprise : ...

Prénom : * Agathe Fonction : Assistante de gestion

Né(e) le : * 04 11 1987 Age : 31 Travail : ...

N° Id : * AS Auto Notes : ...

Sexe : * ☐ Masculin ☒ Féminin

Porteur d'une correction optique : * ☐ Aucune ☒ Verres ☐ Lentilles Opérateur : ...

Type : Simple foyer

Chirurgie : Aucune

☒ Examen avec correction

* = champs obligatoires


OK Modifier Annuler

Attention : ce salarié étant porteur d'une correction optique, le logiciel coche automatiquement la zone « Examen avec correction ». Si le salarié a oublié ses lunettes, pensez à décocher cette case.

D'autres paramètres d'identification peuvent être renseignés de façon optionnelle. La fonction peut être un élément intéressant si le poste occupé peut avoir un impact sur la vision du salarié.

Une fois l'identification terminée, cliquez sur « OK ». L'examen peut commencer.

Possibilité de réaliser un examen en utilisant des séquences préprogrammées ou manuellement.
 Pour utiliser les séquences paramétrées, choisissez la séquence désirée dans la liste des séquences de la barre d'outil.
 Ensuite, cliquez sur « S » pour lancer l'examen.

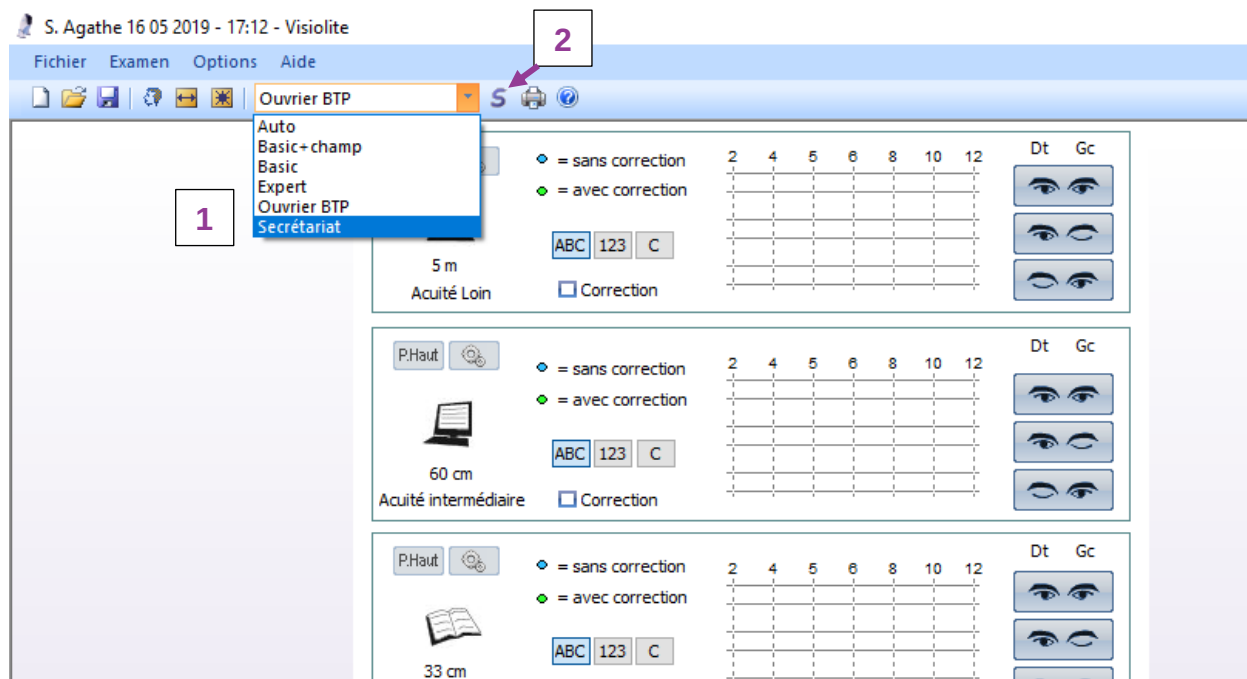

- 1- Lisez les instructions au salarié.
 - 2- Cochez la réponse donnée par le salarié.
- Case « Echec » : le salarié n'a pas compris les instructions et a répondu à côté.
- 3- Déroulez tout le protocole en cliquant sur suivant. A tout moment de l'examen, vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur « Précédent », ou passer un examen que vous ne voulez pas faire mais qui fait partie de la séquence en cliquant sur « Suivant ».

Phories Bino Loin Mesopique

1 Dans quelle case voyez vous le point blanc ?

4 = Exophorie
 5 = Orthophorie
 6 = Esophories
 Autre = Hyperphorie

2

1	2	3
4	5	6
7	8	9

☐ Photopique bas
☐ Hors grille
☐ Echec

3

<< Précédent
Quitter
Suivant >>

Instructions opérateur

Cochez la réponse.

Pour réaliser un examen en mode manuel, sélectionnez le test souhaité en fonction des divers boutons de commande.
Exemple avec le test de l'acuité de loin :

Choix du **photopique** haut ou bas

P.Haut

5 m
Acuité Loin

ABC

123

C

☒ Correction

245681012

DtGc

Paramètres

Acuités mini
 Bino :

4

 Mono :

2

4

5

6

OK

« Paramètres » : En option, vous pouvez ajouter un **scoring** à l'examen.
 Attention, ce bornage doit impérativement être validé par le médecin.

Choix affichage **ABC, 123** ou **anneaux de Landolt**

Dès qu'un bouton de commande est sélectionné, l'appareil se positionne sur le test correspondant et la fenêtre de cet examen apparaît.

P.Haut

5 m
Acuité Loin

ABC

123

C

☒ Correction

245681012

DtGc

Acuité Bino Loin Photopique haut

En partant de la première ligne, lisez toutes les lettres.

1.	2	U	T	Z	P	E	V	☒
2.	4	A	R	P	V	F	E	☒
3.	5	C	T	L	U	P	Z	☐
4.	6	H	R	P	C	A	U	☐
5.	8	P	F	Z	H	K	R	☐
6.	10	E	T	P	K	N	F	☐
7.	12	K	H	C	P	F	L	☐


☐ Photopique bas
 ☐ Correction
 ☒ Echec
 ☐

Cochez chaque ligne correctement lue.
 Une ligne mal lue contient 3 echecs ou plus.


Quitter

En fin d'examen, possibilité d'ajouter des informations communiquées par le salarié durant l'examen et non renseignées sur l'identification.


Dans la barre des tâches, allez dans « Examen » et sélectionnez « Commentaire » :

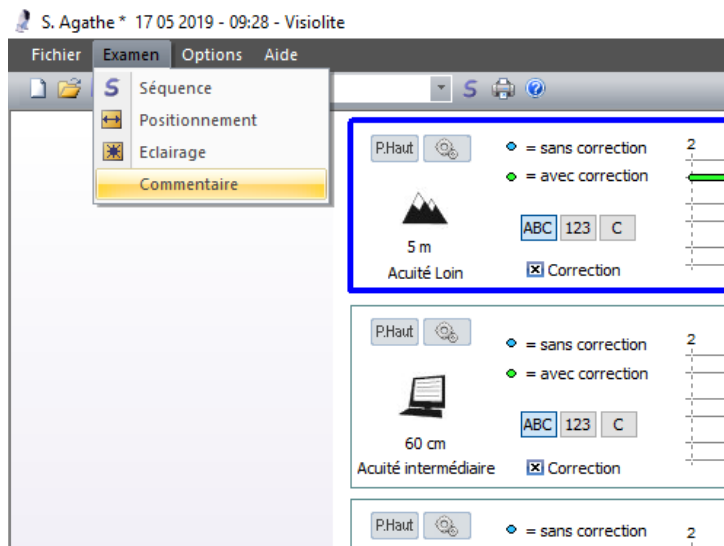

Saisissez le commentaire et cliquez sur « OK » pour enregistrer.

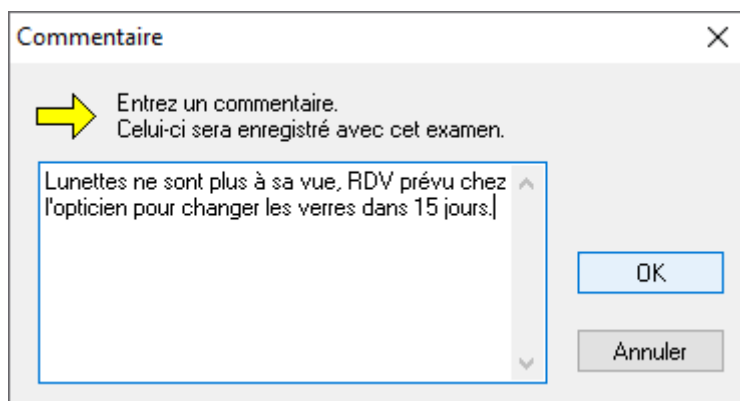



Enfin, enregistrez l'examen en cliquant sur l'icône de sauvegarde.

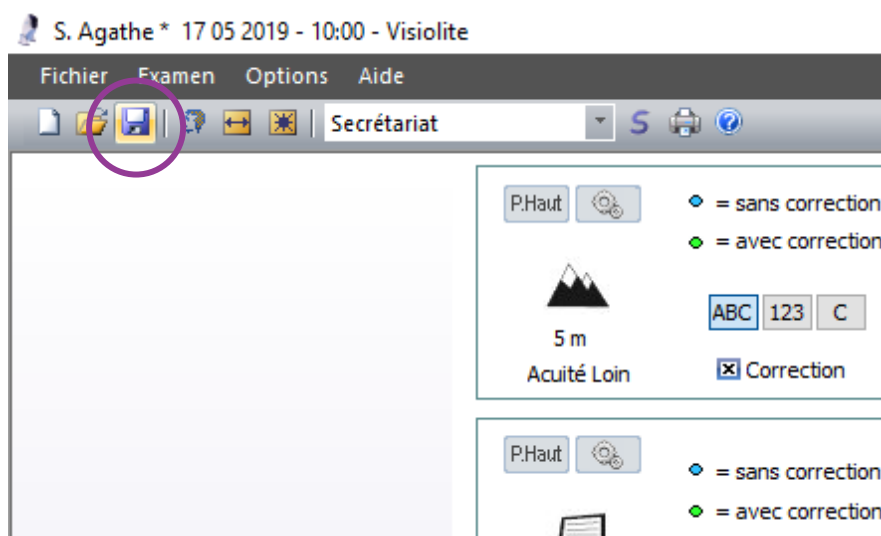



Si le logiciel Visiolite® est interfacé, c'est grâce à cet enregistrement que l'examen remontera dans le logiciel métier. Sans interface, c'est ce qui vous permettra d'incrémenter la base de données FIM et de pouvoir retrouver d'anciens examens ainsi que les salariés déjà enregistrés.

IV- LES ICONES RESTANTES


UNIQUEMENT SANS INTERFACE : L'icône « Ouvrir » permet de rechercher un examen existant.

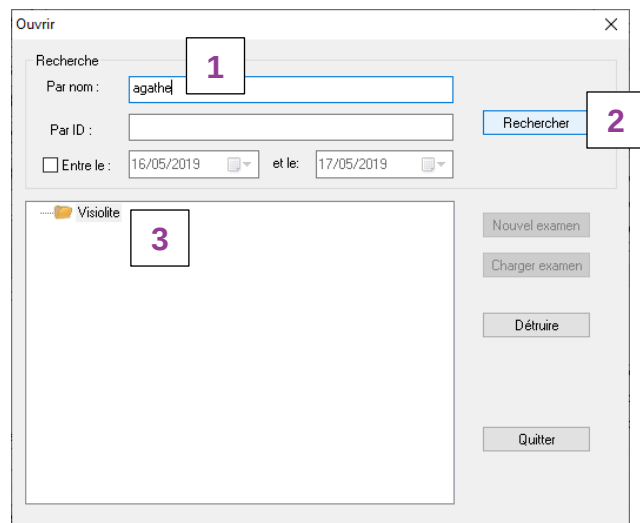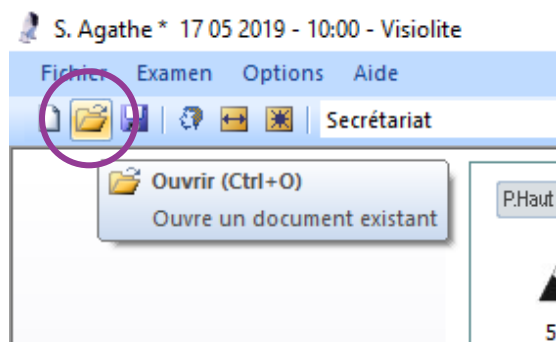


L'icône « Identification » permet de modifier ou d'intégrer une information complémentaire sur une identification déjà renseignée lors de la création.

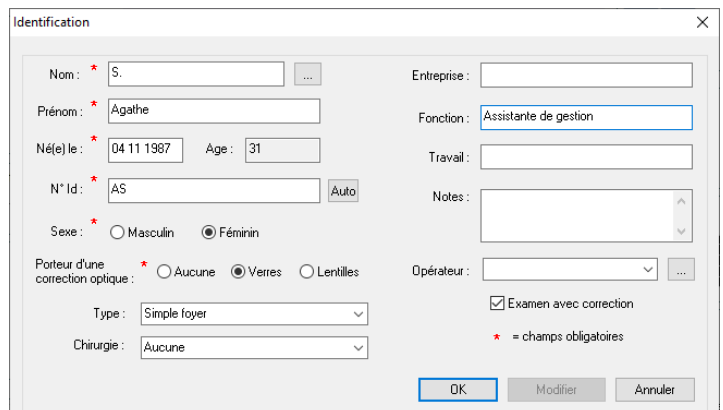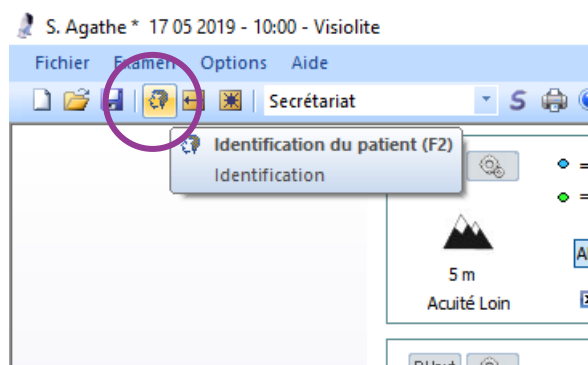

L'icône « Eclairage permanent » permet d'ôter le rétroéclairage du contact frontal et de laisser le Visiolite allumé en permanence.

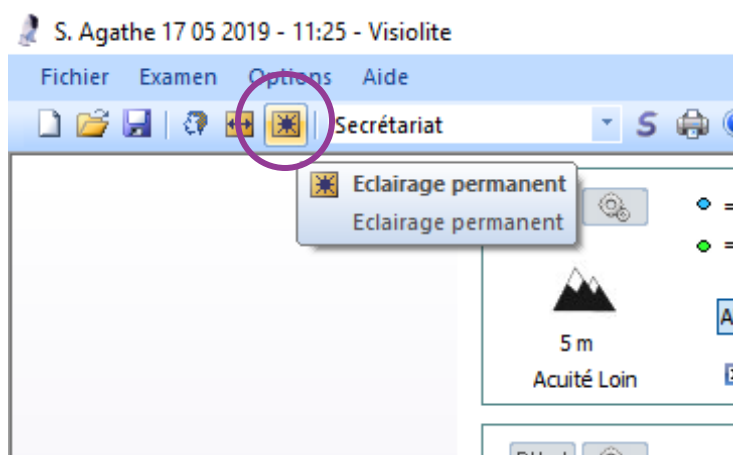


Enfin, l'icône « A propos de » vous donne la version du logiciel.

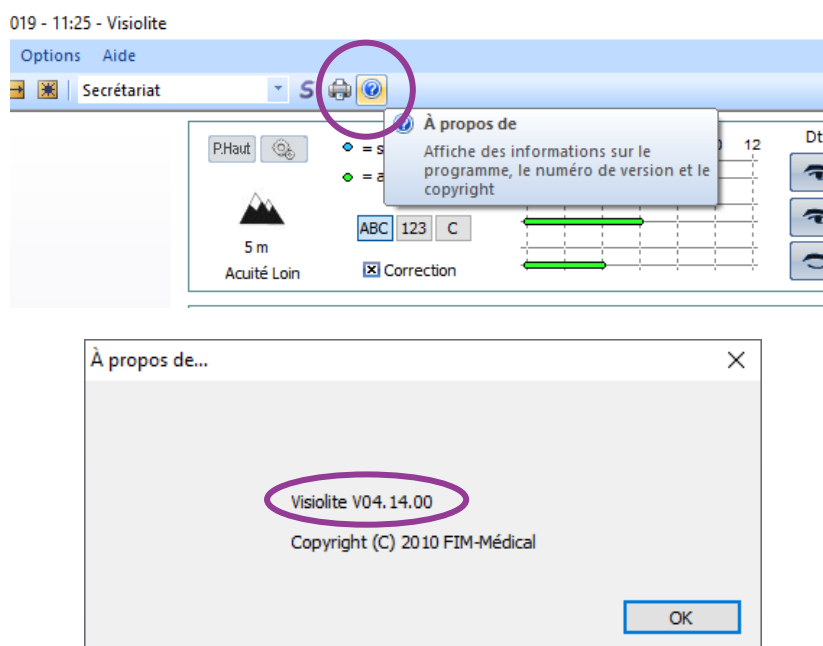

V- IMPRESSION DE L'EXAMEN

Il existe 2 types d'impression du rapport d'examen.

- Pour imprimer directement avec le logiciel Visiolite®, cliquez sur « Imprimer ».

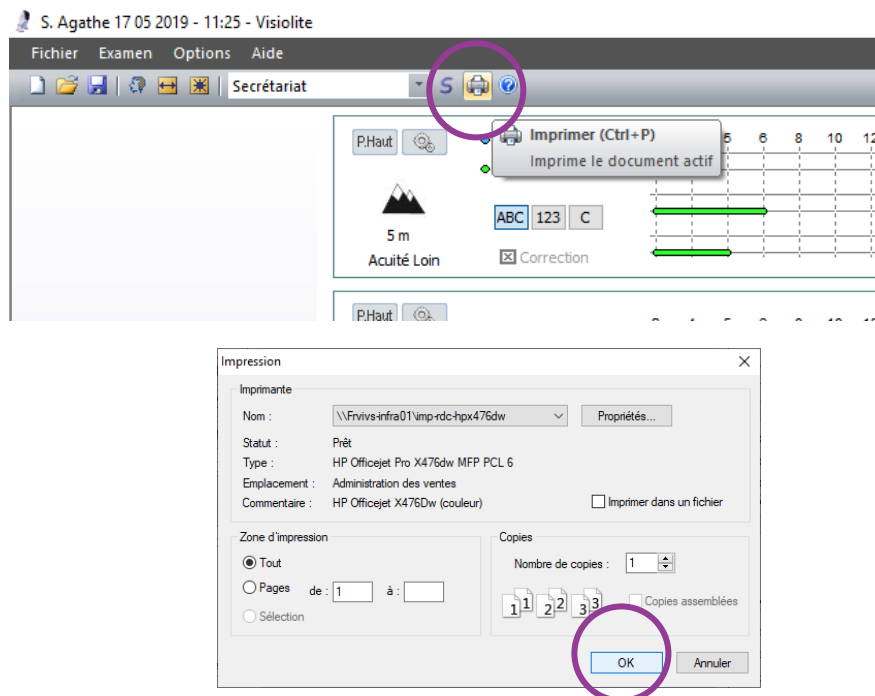

Nom : S.	Né le : 04 11 1987	Date : 17 05 2019 - 11:48	Opérateur :
Prénom : Agathe	Age : 31 Ans	Correction : Simple foyer	Commentaire : Lunettes ne sont plus à sa vue, RDV prévu chez l'opticien pour changer les verres dans 15 jours.
ID : AS	Sexe : Féminin	Test avec correction : Oui	

Acuité Loin  5m Photopique haut	Dt Gc                                                                                                  
--	---

- Si l'export est automatique, un rapport d'examen en version PDF s'enregistrera automatiquement à l'endroit indiqué dans les paramètres.

NOTES

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.