


Description :

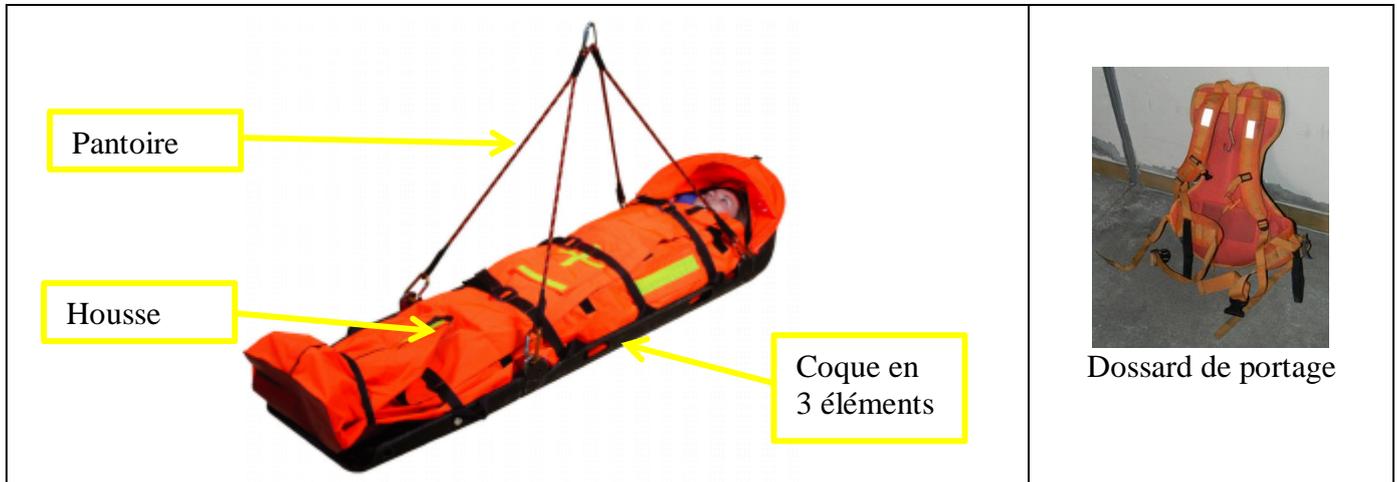

Le brancard de secours Franco Garda est un brancard pliant, hélictreuillable. Il est destiné à l'immobilisation et à l'évacuation de blessés dans toutes les positions.

La charge maximale d'utilisation est de 150 kg.

Il ne protège pas le blessé des conséquences d'un choc violent. Il est donc important de le manœuvrer avec précaution lors du transport.

Dimensions et poids :

	Dépliée	Pliée
Longueur	200 cm	105 cm
Largeur	54 cm	
Hauteur	22 cm	
Poids	13 kg 500	

Utilisation :

Dépliage et pliage de la civière :

Le système d'articulation permet au choix de replier la partie avant et la partie arrière sur la partie centrale ou de les détacher de cette dernière.




Dépliage de la civière :

- Relever la partie à déplier à la verticale
- Relever le levier de verrouillage vers le haut
- Plaquer la partie de la coque contre la partie centrale, de manière à ce que la butée de positionnement soit bien insérée dans son logement.
- Rabaisser et bloquer le levier de verrouillage
- Le système doit **impérativement** être verrouillé par un mousqueton dans l'œillet (ceux de l'élingue ou des autres) ceci quel que soit l'utilisation de la civière.

Pliage de la civière :

- Dégager les leviers de verrouillage et tourner-les en position verticale.
- Se placer en prolongement du brancard et tirer la partie à plier vers soi.
- Soulever légèrement la base de la partie à plier et la relever.
- Rabaisser les leviers de verrouillage.
- Plier complètement la partie basse jusqu'à ce qu'elle se place contre la partie centrale

Mise en place d'un patient dans la housse : Immobilisation :

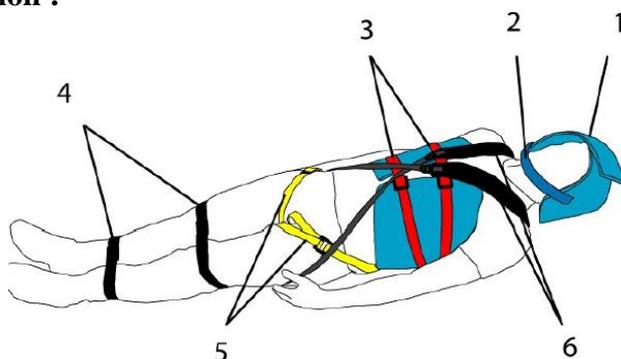

Placer le blessé dans la housse, **le plus haut possible**.

Ajuster la tête pour maintenir au mieux la tête (1).

Placer la mentonnière (2).

Placer et fermer les volets de maintien thorax (3).


Fermer et ajuster les sangles de maintien « culotte » (5).

Fermer les bretelles et ajuster la tension de manière à ce que le blessé soit maintenu fermement (6).

Maintenir les jambes avec les deux sangles de maintien (4), les positionner sur la daisy chain centrale selon la taille de la personne.

Mise en place avec un patient conditionné dans un matelas à dépression :

Un patient déjà conditionné dans un matelas à dépression peut être immobilisé dans la housse de médicalisation.

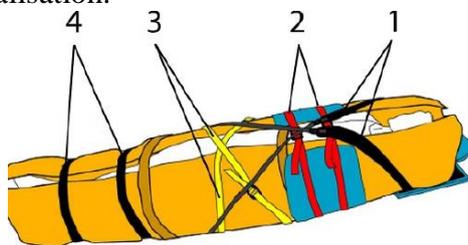

Mettre à plat la tête.

Placer le patient et le matelas à dépression dans la housse.

Placer et fermer les volets de maintien thorax (2).

Fermer en croisant les sangles de maintien « culotte » et serrer (3).

Fermer les bretelles et ajuster la tension de manière à ce que le blessé soit maintenu fermement (1).

Maintenir les jambes avec les deux sangles de maintien (4).

Fermeture de la housse :

Rabattre précisément les deux volets extérieurs de la housse.
Fermer correctement les quatre sangles extérieures
Ajuster la tension de chaque sangle pour immobiliser complètement le blessé.


Utilisation de la pantoire :

Mise en place :


Pour une phase de treuillage, chaque mousqueton (1) doit être passé doigt vers l'intérieur de la civière au travers d'une des 4 pattes d'articulations (2).

Les brins de pantoire avec les caches couture rouges doivent être mousquetonnés sur les pattes d'articulations avant repérées en rouge.

Les brins de pantoire avec les caches couture noirs doivent être mousquetonnés sur les pattes d'articulations arrière repérées en noire.

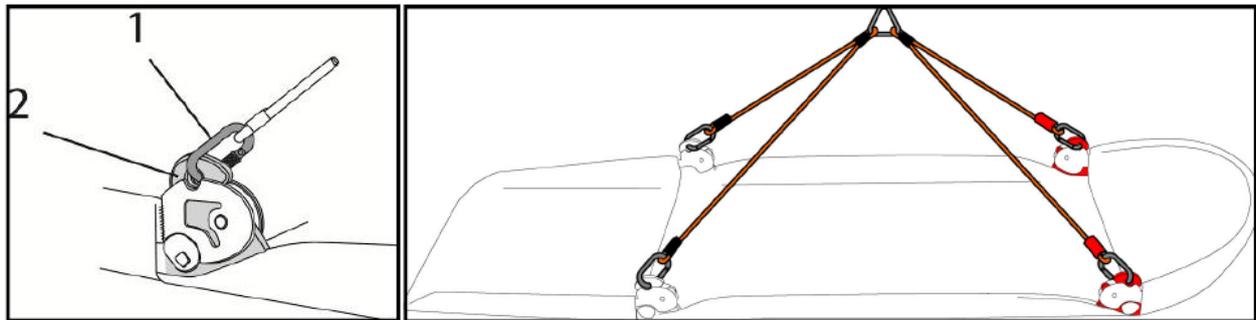

La pantoire doit être reliée au dispositif de traction par le maillon delta triangulaire central. Bien vérifier la bonne fermeture de ce maillon rapide.

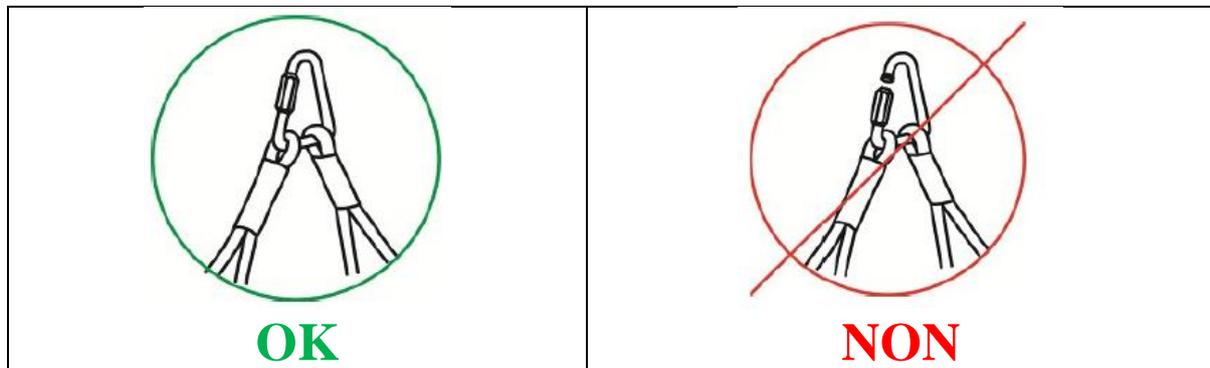

Portage de la civière avec le harnais :

Un harnais de portage permet de porter la civière sur le dos, en position repliée.

Installation du harnais de portage :

Positionner le crochet sur la partie haute de la civière. La tête du brancard doit être orientée vers le haut (1).

Passer les sangles basses dans les poignées inférieures de la coque centrale (2).

Serrer les 2 sangles en répartissant bien la tension entre la droite et la gauche.



Autres systèmes adaptés à la civière :
Système de portage (hampes + dossards) :



Système de guidage à ski :





Nettoyage et désinfection :

Pour l'ensemble du brancard le nettoyage à haute pression et l'utilisation de la vapeur ne sont pas autorisés.

Ne pas utiliser des poudres à récurer ou des produits et tampons de récurage contenant des substances abrasives.

Ne pas utiliser de détergents contenant des acides.

Pour le nettoyage et la désinfection courante, vous pouvez utiliser les produits usuels tels que l'eau chaude et froide, les détergents, des solutions alcalines et des alcools utilisés pour le matériel SAP.

Laisser sécher naturellement à l'écart de toute source de chaleur sans exposition au soleil.

***Note :** Le choix des éléments d'un système reste à l'appréciation du chef d'unité GRIMP. Vu la diversité des opérations GRIMP, les systèmes présentés dans ce document ne peuvent être la solution ! Ils ont simplement vocation à décrire les principes de manœuvres.*