


Procédure à ne réaliser qu'une seule fois au début, ou au changement d'appareil

## I. DEPUIS LE MONITEUR TOUCH7


1. Allumer le moniteur multiparamétrique TOUCH7
2. Toucher l'icône de connexion au réseau de l'appareil

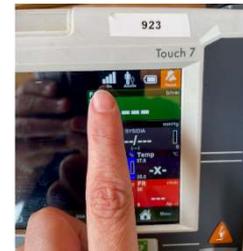

3. Dans le menu, sélectionner ePCR 




4. Activer la visibilité Bluetooth : appuyer pour sélectionner « ON » 

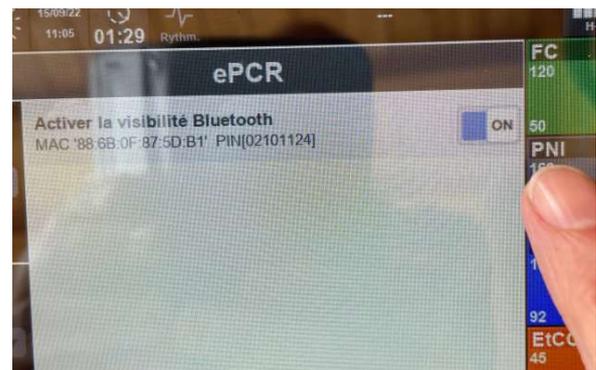


## II. AVEC LA TABLETTE :


1. Sélectionner « Réglages » puis 

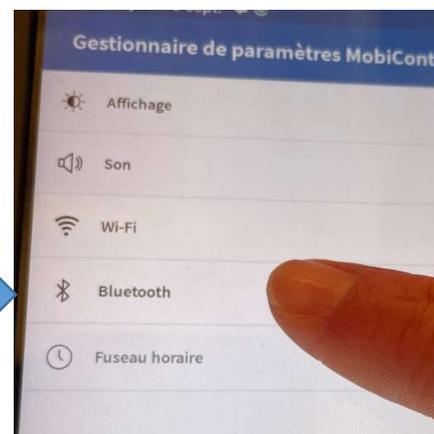

2. Le scan de nouveaux appareils se lance automatiquement. Vous pouvez le vérifier en bas de la fenêtre. Si la mention « ARRETER » est présente, le scan est lancé. Ne toucher à rien, attendez.

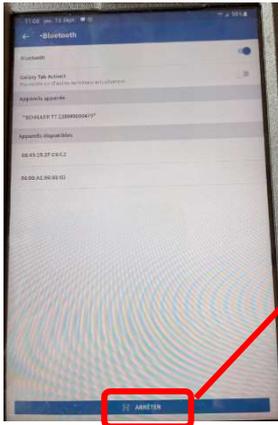



NB : Si le scan ne s'est pas lancé automatiquement, appuyer sur

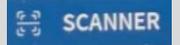

La recherche d'appareils disponibles peut être plus ou moins longue.


**NE TOUCHEZ A RIEN EN ATTENDANT**, laisser faire les choses.

3. Lorsque la tablette aura détecté le moniteur TOUCH7, il apparaîtra dans les « Appareils disponibles ».

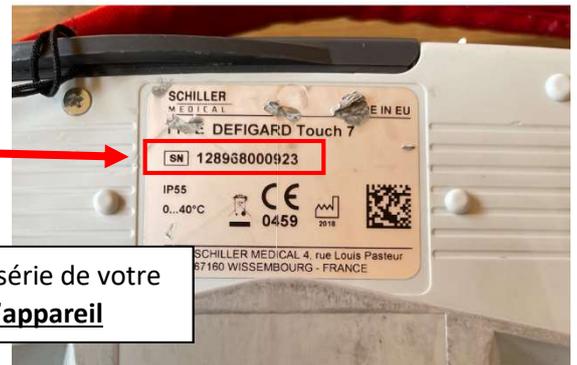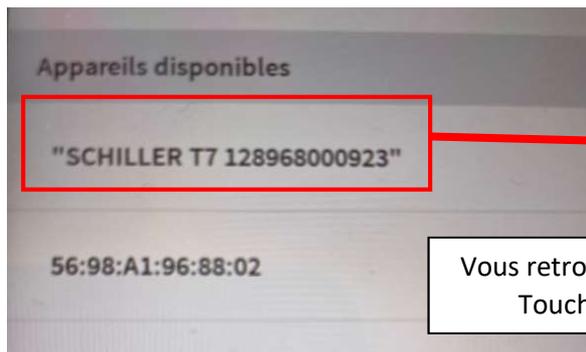


Vous retrouvez le n° de série de votre Touch7 **au dos de l'appareil**

4. Appairer la tablette au TOUCH7

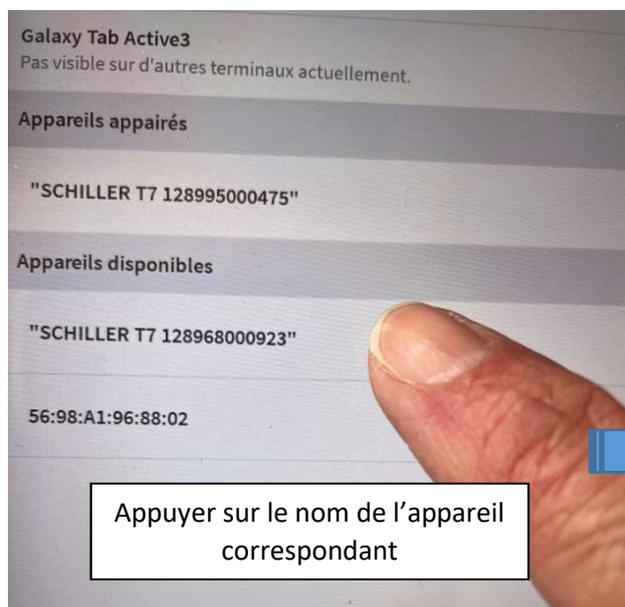


Appuyer sur le nom de l'appareil correspondant

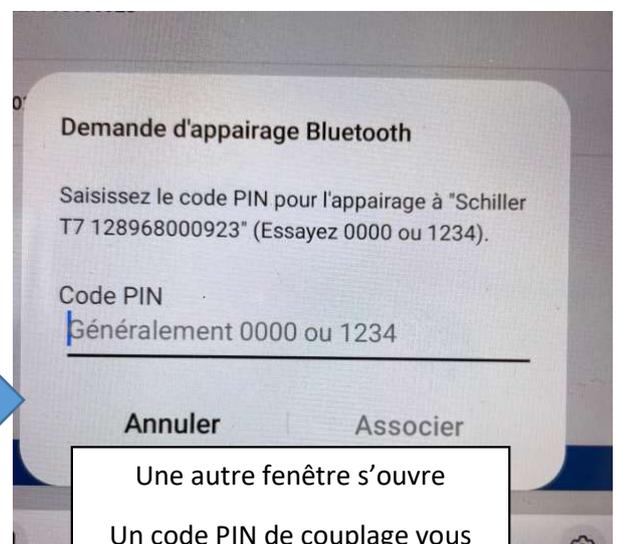


Une autre fenêtre s'ouvre  
Un code PIN de couplage vous sera demandé

**⚠** Vous trouverez le code PIN en regardant l'écran de votre TOUCH7


Ici : 02101124

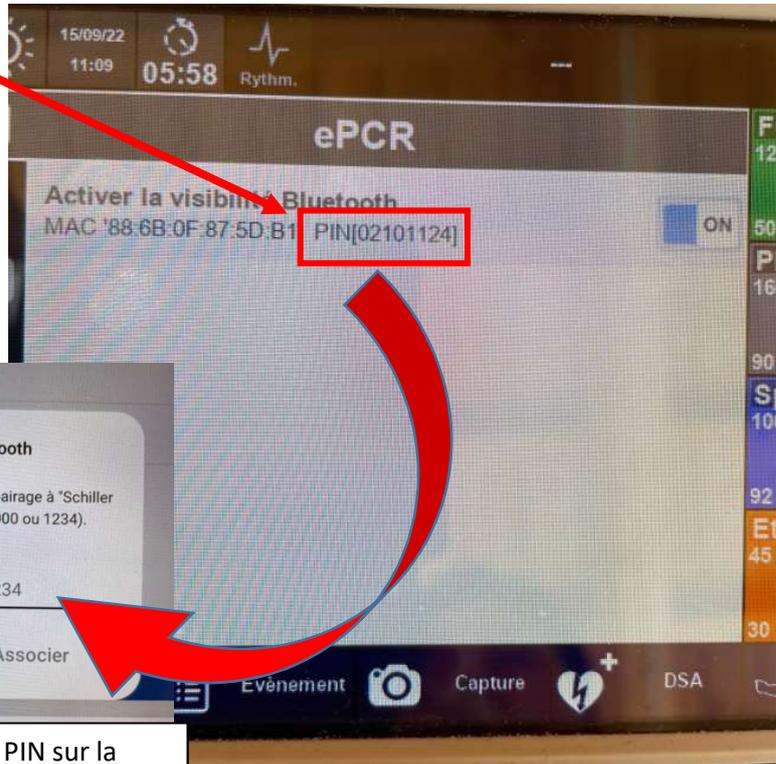

Renseigner le code PIN sur la tablette puis faites « Associer »

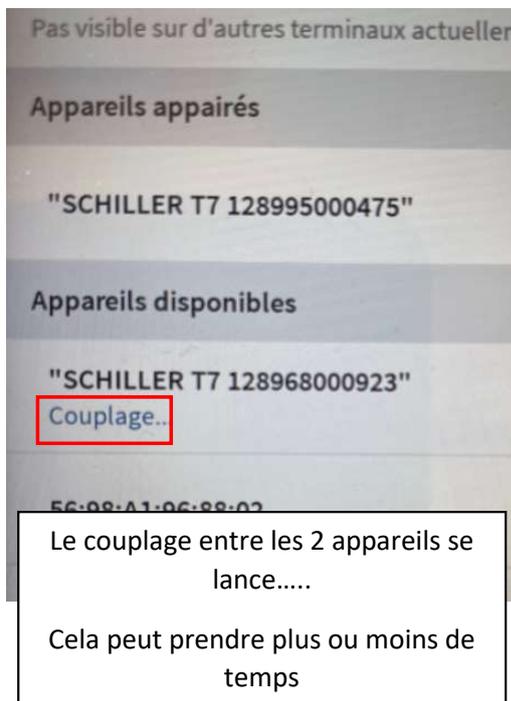

Le couplage entre les 2 appareils se lance.....  
Cela peut prendre plus ou moins de temps

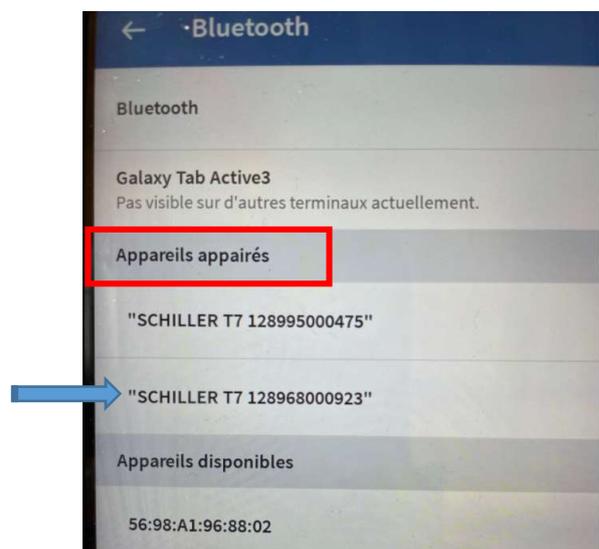

Lorsque l'appairage est réussi, votre moniteur apparaît dans « **Appareils appairés** »

Il se peut que l'appairage échoue. Si cela se produit, renouveler l'opération depuis l'étape 4.