

 PÔLE SANTE	URGSAP REMONTEE DES DONNEES BILANS DU TOUCH7 VERS URGSAP		Création : Septembre 2022
	SSSM	URGSAP - TUTORIEL UTILISATION N°2	

L'appairage entre la tablette et le scope multiparamétrique TOUCH7 vous permet de remonter les données paracliniques du bilan (pouls, tension artérielle, saturation, ...) prises via le TOUCH7 directement sans avoir à ressaisir les informations.

Dans le bilan XABCDE d'URGSAP, vous trouverez à plusieurs reprises cette icône :



C'est elle qui permettra la communication entre le TOUCH7 et le bilan URGSAP

Remontée des données du bilan TOUCH7 dans URGSAP

Dans l'exemple ci-dessous, je suis dans le bilan B respiratoire, je souhaite faire remonter les données de la saturation :


Je viens appuyer sur l'icône



A la 1ère utilisation sur intervention, il va vous être demandé de choisir l'appareil avec lequel vous souhaitez vous connecter




Choisissez celui qui correspond puis valider par **OK**


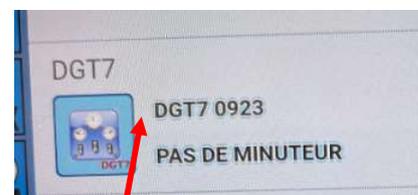


Le numéro de votre multiparamétrique va apparaître à côté de l'icône

A partir de là, je peux remonter les données de mon multiparamétrique

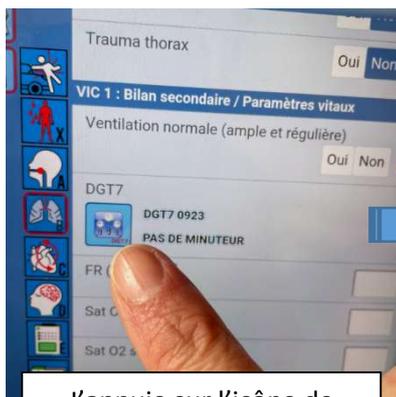

J'appuie sur l'icône de mon appareil

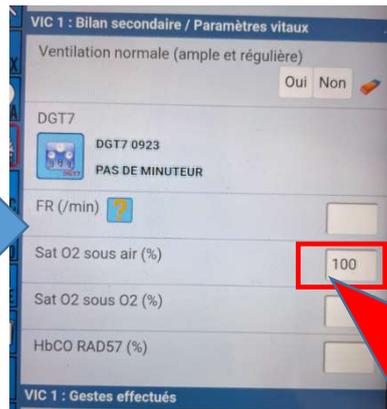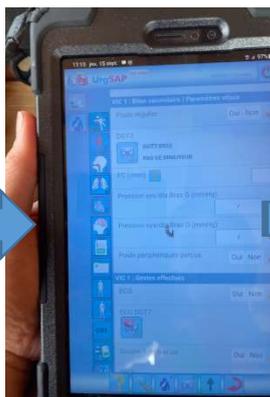

La donnée de la saturation mesurée par mon appareil TOUCH 7 remonte dans le bilan URGAP





Remontée des données du bilan cardiaque :

Je vais dans l'onglet C du bilan URGAP. Je retrouve l'icône de connexion. Comme une remontée avec mon appareil dans le cadre du bilan respiratoire a déjà été réalisée, le TOUCH7 est déjà reconnu par la tablette



J'appuie sur l'icône de mon appareil

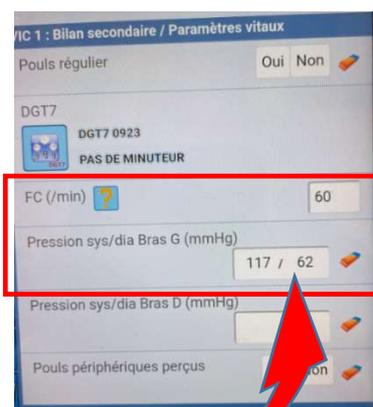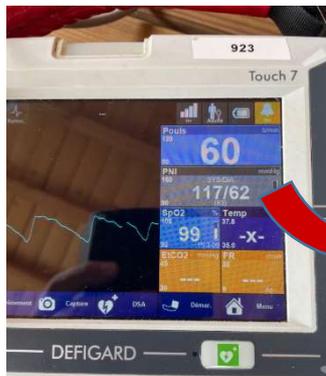

Les données du pouls et de la tension remontent dans le bilan



Pour la pression artérielle, la remontée des chiffres depuis le TOUCH7 incrémente par défaut la tension artérielle **BRAS GAUCHE**

