


I. Réaliser l'ECG via le multiparamétrique TOUCH7

Coller les électrodes sur le thorax de la victime selon les recommandations.



Connecter les câbles ECG aux électrodes

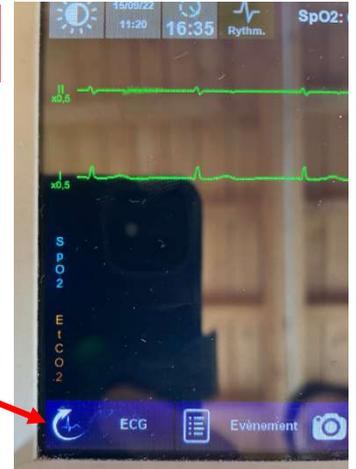

1. Depuis l'écran d'accueil du TOUCH7, je viens sélectionner





2. Je sélectionne

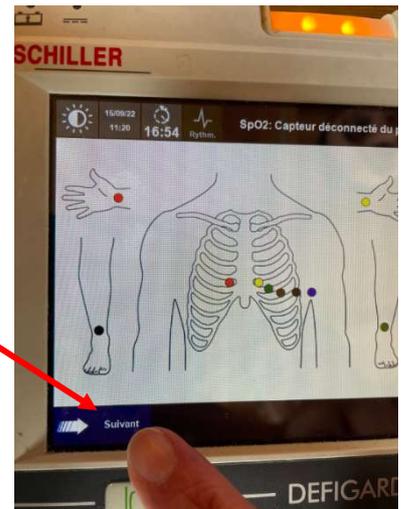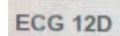

3. Je sélectionne




4. Renseigner les informations du patient

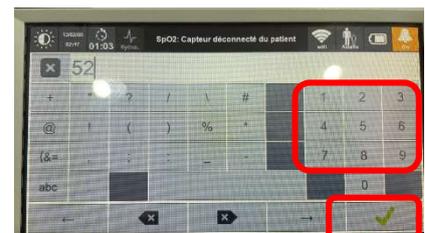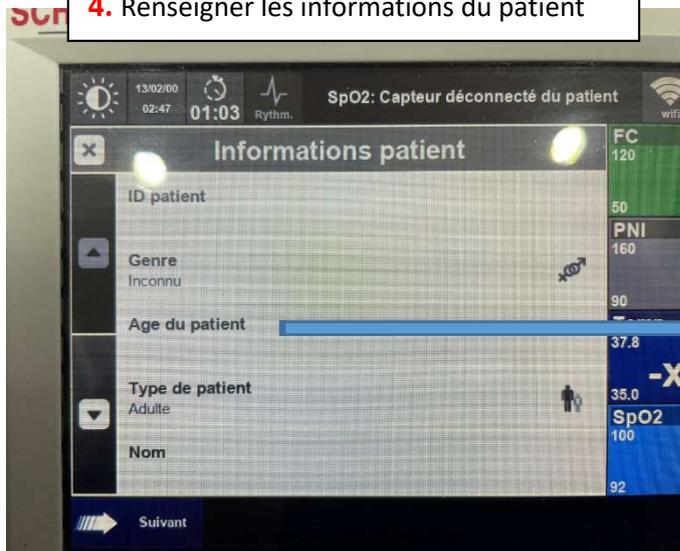


Pour l'âge, je me sers du pavé numérique et je valide avec



5. Une fois les infos enregistrées, faire

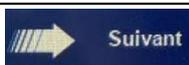

Suivant

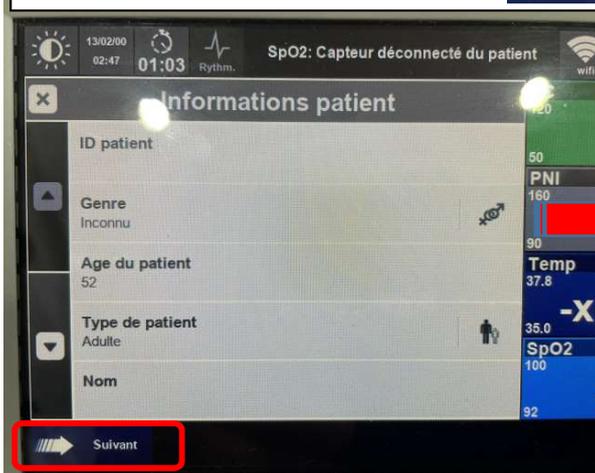


L'enregistrement de l'ECG se lance
Une échelle de progression indique l'évolution de l'acquisition

Une fois l'enregistrement terminé, cette fenêtre apparaît quelques secondes, puis retour automatique à l'écran de surveillance du TOUCH 7




II. VISUALISER L'ECG SUR TOUCH7

Depuis l'écran d'accueil, aller dans MENU – puis choisir ECG 12D

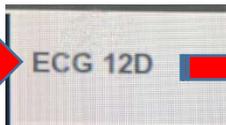

La liste des ECG réalisés apparaît (horodatée)

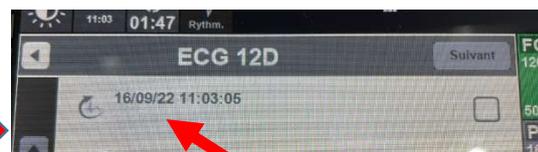

Pour visualiser l'ECG sur l'écran du TOUCH7,
appuyer sur la date – heure
(Ne pas cocher la case)




Possibilité d'afficher l'interprétation
et les mesures de l'ECG



Par défaut, affichage des dérivations I II III.
 Pour afficher les différentes dérivations, balayer l'écran de bas en haut



I – II – III

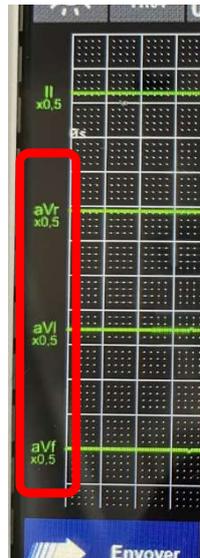

aVr – aVI - aVf



V1 – V2 – V3



V4 – V5 – V6

III. Intégrer l'ECG réalisé avec le TOUCH7 dans le bilan URGSAP de la tablette


1. Sélectionner l'onglet C du bilan (bilan cardiaque)



2. Repérer l'icône « ECG DT7 » et appuyer dessus




3. Un lien hypertexte horodaté apparaît sous l'icône quand votre ECG est bien remonté dans votre bilan

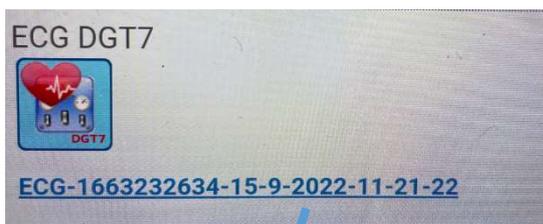

ECG réalisé le 15 septembre 2022 à 11h21min 22 sec

En sélectionnant le lien, cela ouvre une nouvelle fenêtre sur votre tablette et vous affiche l'ECG en format .pdf

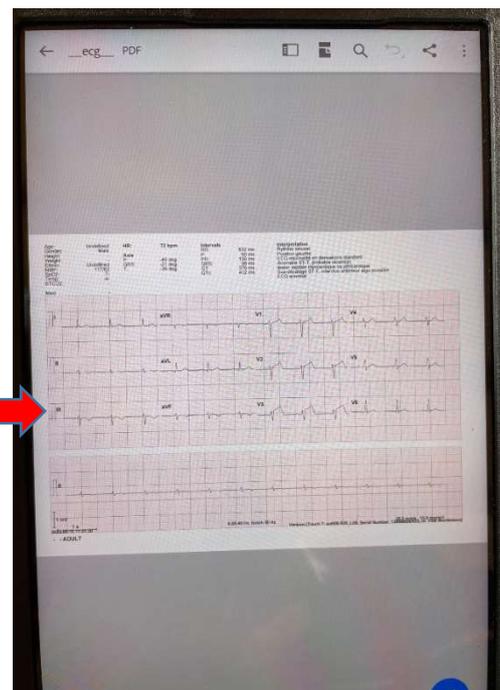

Pour revenir au bilan URGSAP, utiliser le bouton en bas de la tablette.