

» SUAP-FM-23

Kit section de membres



Définition / Description

Objectif : Envelopper un membre sectionné et permettre sa conservation dans les meilleures conditions dans l'attente de sa réimplantation éventuelle.



- La composition du kit section de membres est définie dans le recueil des moyens opérationnels.
Accès via intranet : [Le kit section de membres](#)



Indications

- Le kit section de membres est utilisé pour envelopper un membre et permettre sa conservation dans les meilleures conditions.
- Le froid permet de préserver un membre amputé, pendant la prise en charge et le transport du blessé dans l'attente de sa ré-implantation éventuelle.



Risques et contraintes

- Le membre sectionné ne doit jamais être mis en contact direct avec la glace, cela pourrait entraîner des gelures pouvant compromettre sa réimplantation.



Utilisation



- Mettre des gants à usage unique propres.
- Nettoyer le membre, si nécessaire, avec un flacon de Miniversol.



- Envelopper le membre sectionné dans un champ stérile.



- Placer le tout à l'intérieur du sac plastique se trouvant au milieu du sac isotherme.
- Refermer cette poche à l'aide du Zip.



- Activer les sacs réfrigérants en les percutant.



- Placer les sacs réfrigérants à l'intérieur du sac dans les deux poches latérales.



- Maintenir le sac isotherme fermé grâce au scratch.
- Noter le nom de la victime et l'heure de survenue de l'accident.



Entretien / Maintenance

Contrôler l'état du matériel ainsi que les dates de péremption.



Points clés

Le membre sectionné est :

- Protégé par un champ stérile.
- Placé au froid sans contact direct avec les poches réfrigérantes.



Critères d'efficacité

Le membre sectionné est rapidement et correctement préservé dans le kit prévu à cet effet.