

INSTRUCTION

Utilisation / entretien et montage
de l'aspirateur manuel et à pied

Identification :

IN.BM/048

Version : A

Date d'application :

Septembre 2006

Page : 1/6

OBJET : Cette instruction définit le mode d'utilisation et d'entretien de l'aspirateur manuel et à pied.

DESTINATAIRES POUR APPLICATION :

- Sapeurs-Pompiers
- Médecins SP
- Infirmiers SP

DESTINATAIRES POUR INFORMATION :

- Direction
- Médecin chef
- Formation

DEFINITION : Il s'agit d'un aspirateur à double piston ayant une grande capacité d'aspiration, c'est à dire un débit d'air important et un vide d'air élevé.

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES :

DOCUMENTS DE REFERENCE :

-Mode d'emploi AMBU

SOMMAIRE :

Tableau des modifications ---page 2/6

I- Méthode d'utilisation --- Page 3-6

II - Démontage ---Page 4-6

III - Nettoyage/ Désinfection --- Page 5/6

IV-L'assemblage --- Page5/6 et 6/6

RESPONSABILITES :

REDACTEUR

(Toute personne demandant la
rédaction d'un document)

Service /Fonction :

Nom :GRANGER Christophe

Date : 16 08 06

Visa :

Nom : GAGNE Aurélie

Date : 17/08/06

Visa :

VERIFICATEUR

(toute personne dans le
domaine de compétence)

Service /Fonction : PUI

Nom : COLLADO Eric

Date : 18 08 06

Visa :

APPROBATEURS

(Valide et approuve)

**Chef du
Groupement
S.S.S.M**

Date : 18/08/06

Visa :

**Directeur
Départemental**

Date :

Visa :



INSTRUCTION

Utilisation / entretien et montage
de l'aspirateur manuel et à pied

Identification :

IN.BM/48

Version : A

Date d'application

Septembre 2006

Page : 2/6

TABLEAU DES MODIFICATIONS

Raison de la modification (règlementation, changement d'organisation...)	Date	Version et Page	Paragraphes modifiés
--	------	-----------------	----------------------

Identification :

IN.BM/048

Version : A

Date d'application

Septembre 2006

Page : 3/6

Rédigé par	Vérifié par	Validé par	Validé par
Ch. GRANGER	Pharmacien Cdt	Médecin 2ème classe	Colonel
A. GAGNE	E. COLLADO	D. POURRET	B. ROMATIF

OBJET


Cette instruction décrit le mode d'utilisation et de nettoyage/désinfection de l'aspirateur de mucosité manuel "TWIN POMP".

I - METHODE D'UTILISATION :

L'aspirateur peut être actionné au pied ou à la main en faisant basculer la pédale. Une augmentation de la dépression dans le tube d'aspiration se manifeste immédiatement par une résistance accrue au mouvement de bascule de la pédale.


Le tube d'aspiration est pourvu **d'un embout double**

- **un gros embout :**

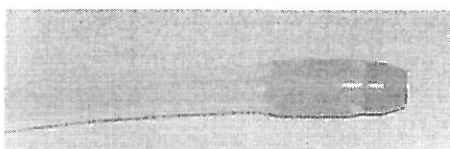

avec un orifice plus gros peut être utilisé directement pour aspirer d'importantes quantités de liquide.

- **un embout fin :**

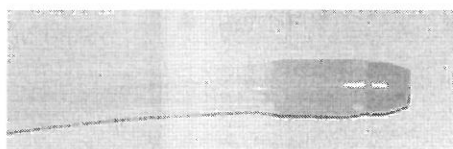

peut être raccordé à une canule d'aspiration

Identification :

IN.BM/48

Version : A


Date d'application

Septembre 2006


Page : 4/6

II - DEMONTAGE :


Pour des raisons d'hygiène, le port des gants est recommandé lors du démontage et du nettoyage.

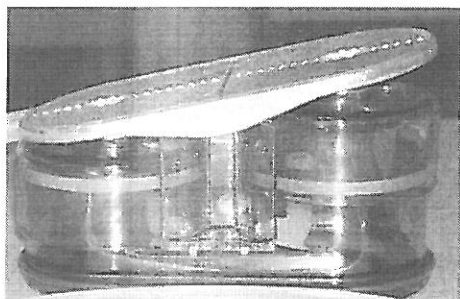


1

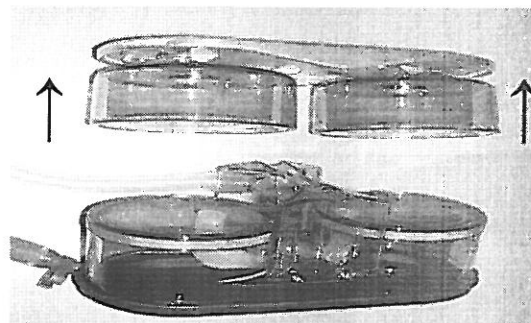


2 Tirer verticalement

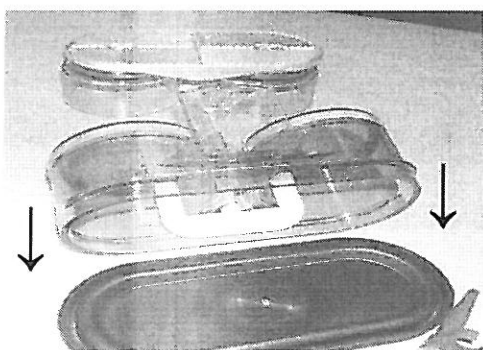


3

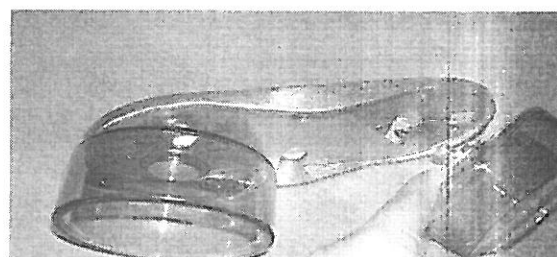

4 Déclisper

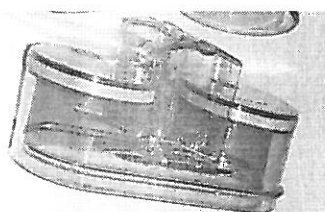

5

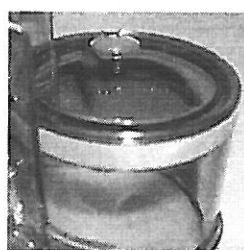

6



7



8

Identification :

IN.BM/48

Version : A

Date d'application

Septembre 2006


Page : 5/6

III - NETTOYAGE/DESINFECTION :


- Laver les pièces à l'eau froide et claire.
- Tremper les pièces dans la solution de désinfection (solution identique à celle du protocole VSAV).
- Laisser tremper 15 minutes dans la solution de désinfection.
- Rincer soigneusement les pièces à l'eau chaude.
- Laisser les pièces sécher avant remontage.

IV - ASSEMBLAGE :

Vérifier que toutes les pièces sont en bon état

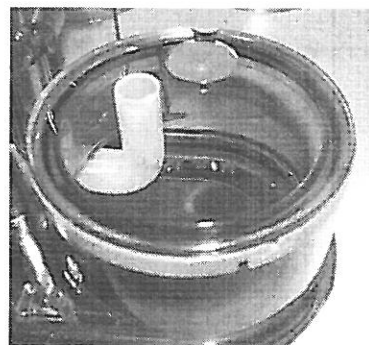

- Mettre les joints thoriques

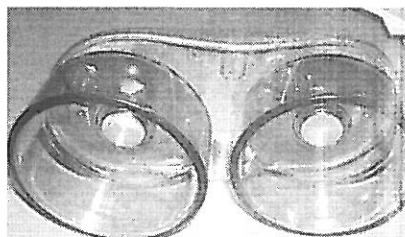

- Placer les cylindres sur la pédale en faisant passer les goujons transversaux sur les ergots de la pédale

Identification :

IN.BM/48



Version : A

Date d'application


Septembre 2006

Page : 6/6

IV - ASSEMBLAGE (Suite) :

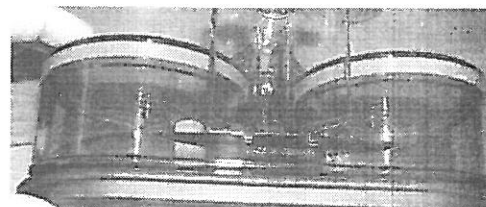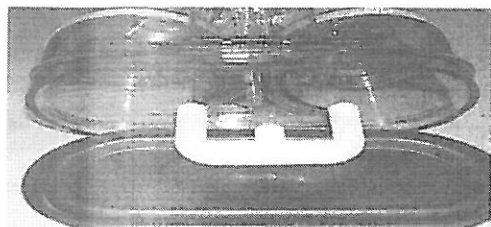

- Enfoncer le tube de répartition dans l'ouverture d'arrivée et
mettre ensuite la plaque de fond en place

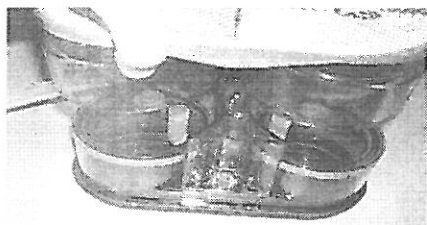

- Mettre le bloc "pédale cylindres"

