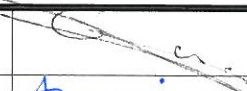
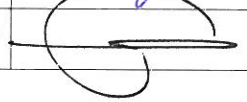


PROCEDURE

UTILISATION DE L'INSUFFLATEUR AVEC FILTRE A USAGE UNIQUE

PR.PH/ 059

Version : A

Rédigé par :	Agent Technique	Christophe GRANGER		DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
	Adjoint Adm.	Patricia SARAIVA		
Vérifié par :	Pharmacien Chef	Eric COLLADO		Pour le Président et par délégation, le Directeur Départemental Adjoint
	Pharmacien Adjoint SPV	Véronique WATTEZ		
Validé par :	Médecin Chef	Didier POURRET		 Colonel Philipps PATHOUX

OBJET : Cette procédure définit l'utilisation de l'insufflateur avec filtre à usage unique

Références : Notice INTERSURGICAL / AMBU

Documents associés :

SOMMAIRE

I	• Suivi des modifications --- page 2/5
II	• Introduction --- page 3/5
III	• Présentation du filtre à usage unique--- page 3/5
IV	• Montage --- page 4/5
	• Nettoyage / désinfection --- page 5/5

Annexe :

Date de mise en application : MAI 2008

Pour informa :

Direction – Médecin Chef – Pharmacien Chef – Service Formation

Pour action :

Tous les SP

Pour diffusion :

PROCEDURE

UTILISATION DE L'INSUFFLATEUR
AVEC FILTRE A USAGE UNIQUE

PR.PH /059

Version : A

SUIVI DES MODIFICATIONS

DATE :	Raison de la modification :
Version et Page :	Paragraphes modifiés :

DATE :	Raison de la modification :
Version et Page :	Paragraphes modifiés :

DATE :	Raison de la modification :
Version et Page :	Paragraphes modifiés :

DATE :	Raison de la modification :
Version et Page :	Paragraphes modifiés :

DATE :	Raison de la modification :
Version et Page :	Paragraphes modifiés :

DATE :	Raison de la modification :
Version et Page :	Paragraphes modifiés :

DATE :	Raison de la modification :
Version et Page :	Paragraphes modifiés :

PROCEDURE

UTILISATION DE L'INSUFFLATEUR AVEC FILTRE A USAGE UNIQUE

PR.PH / 059


Version : A

I – INTRODUCTION :

Les filtres respiratoires sont destinés à être utilisés sur les insufflateurs adulte et enfant afin de protéger la victime, le personnel et le matériel d'une éventuelle contamination microbienne (virus, bactérie ...)

Les victimes sont menacés par une contamination croisée due aux insufflateurs qui ont pu être utilisés précédemment sur un malade infectieux non identifié.

II – PRESENTATION DU FILTRE A USAGE UNIQUE :

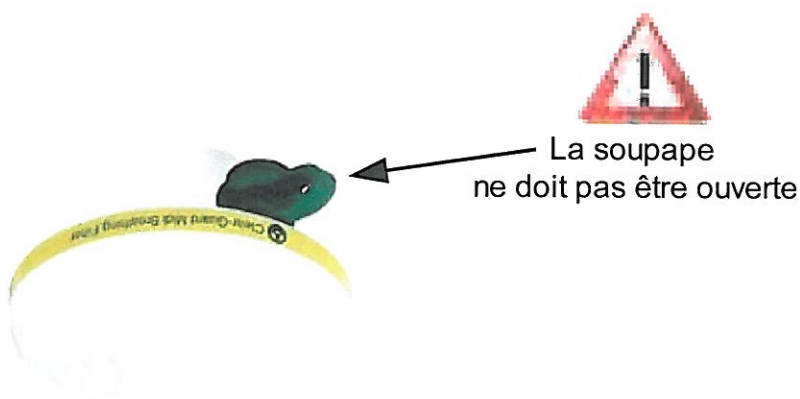

**CE FILTRE EST A " USAGE PATIENT UNIQUE ":
DONC A JETER APRES CHAQUE UTILISATION**


PROCEDURE

UTILISATION DE L'INSUFFLATEUR
AVEC FILTRE A USAGE UNIQUE

PR.PH / 059

Version : A

III – **MONTAGE** : (ce montage doit être réalisé après chaque nettoyage / désinfection et doit être toujours prêt à l'utilisation)

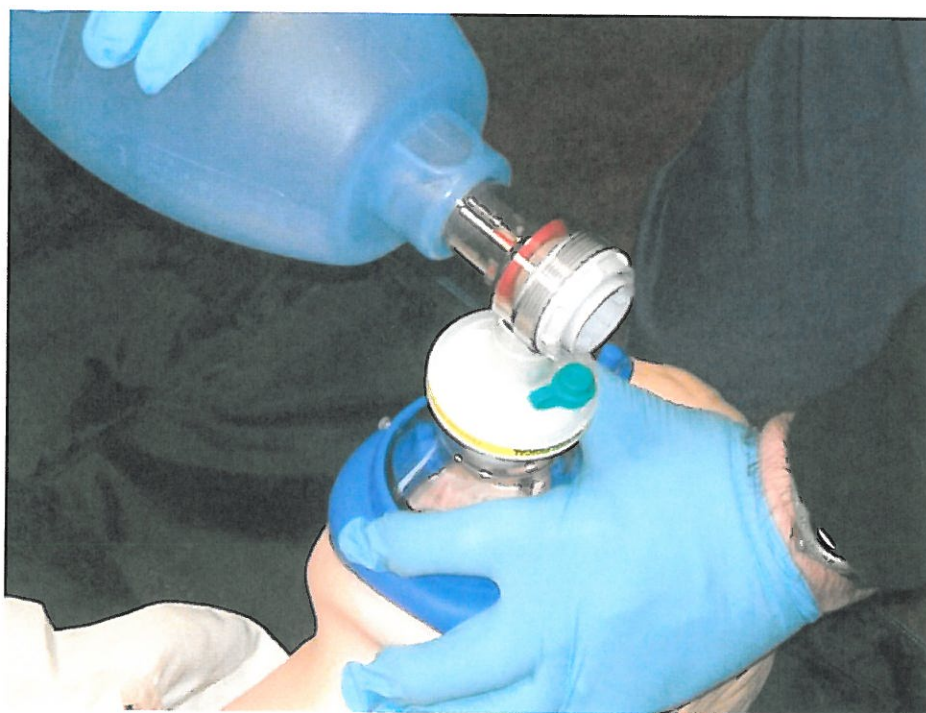

PROCEDURE


UTILISATION DE L'INSUFFLATEUR
AVEC FILTRE A USAGE UNIQUE

PR.PH / 059

Version : A

IV – APRES UTILISATION : (Nettoyage / désinfection / remontage)

- remontage complet avec précaution de l'insufflateur avec le filtre et le masque

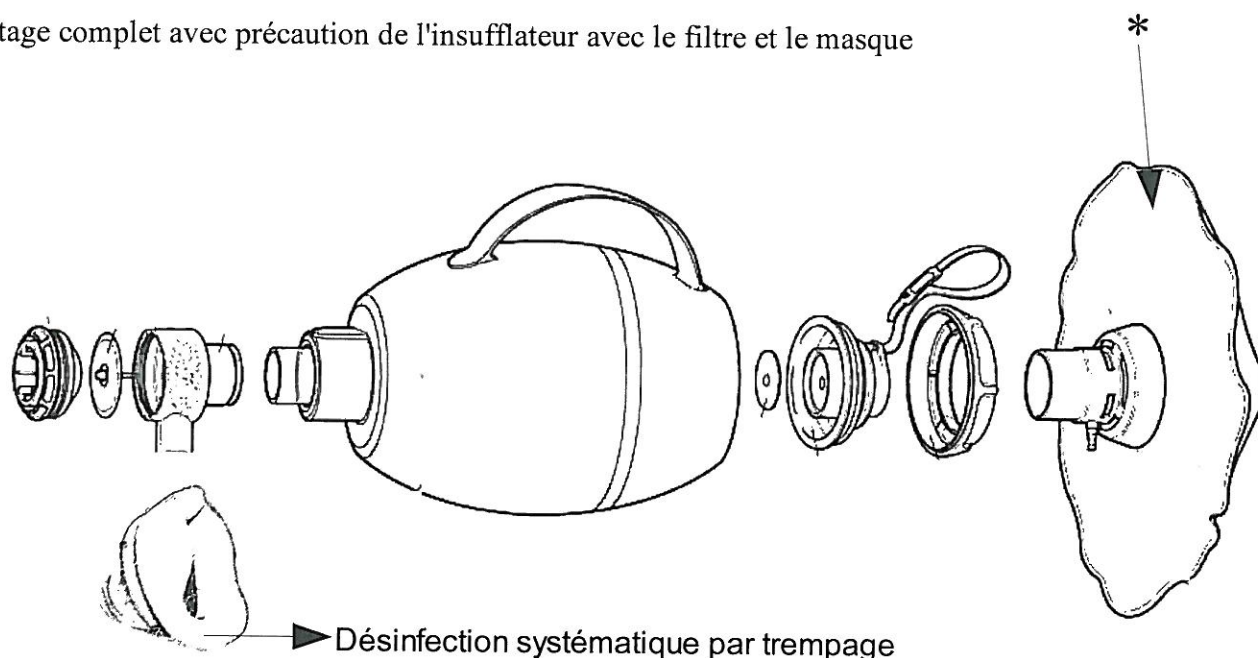

Lavage manuel des pièces avec lingette et spray désinfectant (produits protocole cf : PL/HY 020) à chaque intervention

ATTENTION : Si contamination par liquides biologiques (ex : sang, vomis etc ...) désinfecter par trempage tout sauf la poche* (qui se décontamine par essuyage externe humide uniquement)

RAPPEL de désinfection :

- Immerger pièce par pièce l'insufflateur sauf la poche dans la solution décontaminante 15 minutes
- Rincer à l'eau claire
- et faire sécher

N.B. : nous vous rappelons qu'il y a deux insufflateurs dans le VSAV, veuillez utiliser le 2ème insufflateur pendant le temps de séchage du 1er.