


Identification : <b>IN.SE / 029</b>	<b>Rédigé par :</b> Pharmacien Chef Eric COLLADO Patricia SARAIVA  <b>Vérifié par :</b> Médecin Cne BOUALLEGUE Mounir Adj / C Eric JEANPERRIN	<b>Date d'application :</b> <b>Avril 2007</b>  Version : A	Page : 3/5
<b>OBJET</b>	Cette procédure définit le mode d'utilisation de l'Attelle de DAVIS		

### I - INDICATION et CONTRE INDICATION " IMPORTANT " :

Ce dispositif est **à mettre en place uniquement en présence d'un médecin** et sur sa **prescription** dans les situations de Fracture de Fémur (à l'exception du col), de genoux ou de Jambe (uniquement parties moyenne haute)

Contre-indication : suspicion de fracture de cheville


### II - UTILISATION :

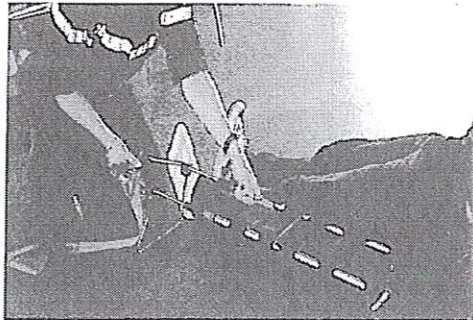

← ① – Placer l'attelle à côté du membre à immobiliser

- Desserer les embouts télescopiques afin d'adapter l'attelle à la longueur optimale

( le treuil doit dépasser le talon de la jambe non-blessée de 20 cm environ)

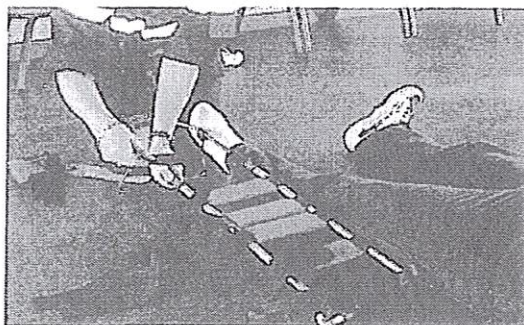

← ② – Incliner le dispositif en utilisant l'étrier.

- Vérifier le blocage de sécurité et bloquer les embouts télescopiques

- Ouvrir les sangles

- Préparer le patient en lui ôtant la chaussure et les vêtements gênants

Identification :


IN.SE / 029

Version : A

Date d'application

Avril 2007


Page : 4/5

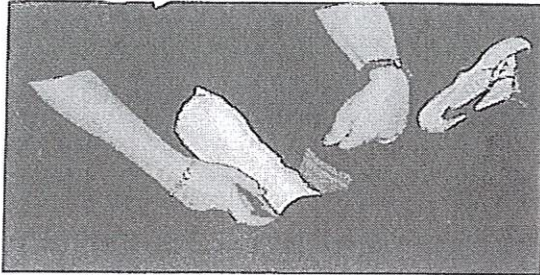


← ③ - Maintenir le membre dans l'alignement.  
Après l'avoir soulevé délicatement

- Installer la chevillère au blessé, sans trop la serrer

- Ajuster la ceinture de traction de la chevillère, le plus court possible

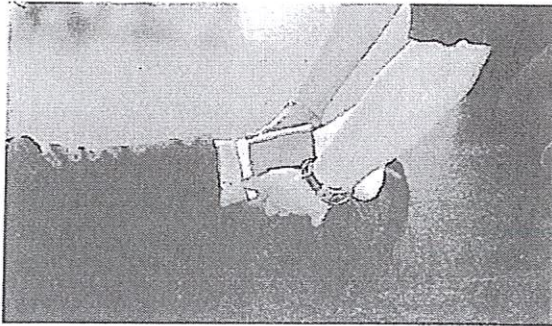

← ④ - Saisir la ceinture de traction en effectuant une légère traction, on garde le membre soulevé dans l'alignement

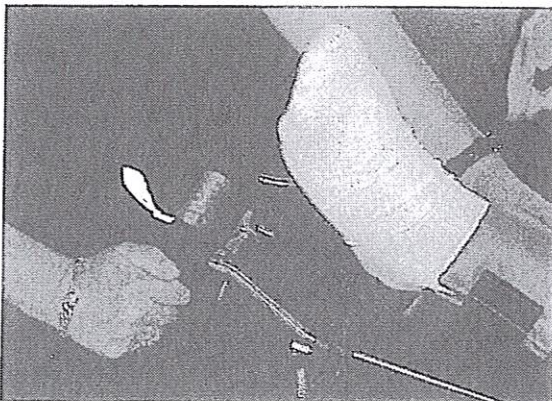

← ⑤ - Installer l'attelle sous le membre inférieur en effectuant une légère traction de la chevillère jusqu'à mettre en contact la partie rembourée avec la fesse

- Accrocher la sangle de traction au crochet du treuil

Identification :


IN.SE / 029

Version : A

Date d'application


Avril 2007

Page : 5/5

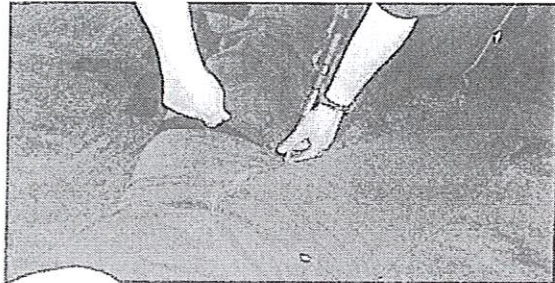


← ⑥ – Fixer la ceinture de hanche en faisant passer la partie la plus longue pour ensuite la bloquer avec le Velcro.

- Vérifier que la ceinture ne bloque pas la circulation du sang

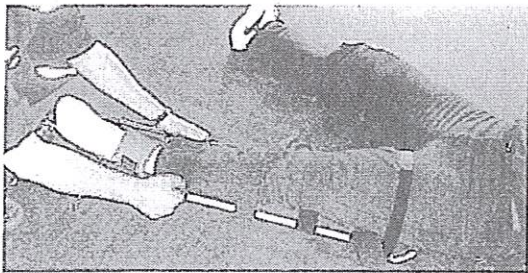

← ⑦ – Utiliser la poignée du treuil jusqu'à effectuer une traction en mesure de réduire le plus possible la douleur (patient conscient) ou jusqu'à ce que la rotation de la poignée devienne difficile (patient inconscient)

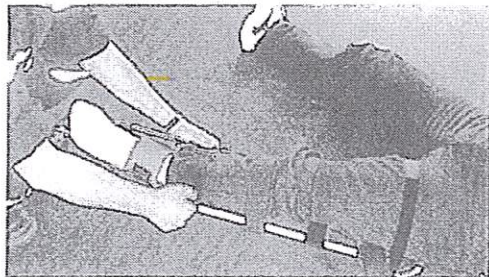

← ⑧ – Après avoir vérifié l'alignement, procéder à la fermeture de toutes les sangles en partant du haut vers le bas et en évitant de bloquer la circulation ou de comprimer le point de fracture