



# TROUSSE DE PREMIERS SECOURS

FICHE MATERIEL  
MEDICO SECOURISTE

FTU MMS 001

## A-OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Ce document est à destination des utilisateurs de la trousse de secours. Celui-ci décrit successivement :

- Le contenu de la trousse
- Les modalités de vérification et de réapprovisionnement.

## B-DOCUMENTS ET PROCESSUS DE REFERENCE

- [Armement « lot de bord » tout véhicule du SDIS.](#)
- FTU MMS Garrot (à venir).
- [Protocole de désinfection du petit matériel](#)
- [Procédure DASRI](#)

## C-DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

### 1. DEFINITIONS

**Pansement absorbant** : Pansement avec une grande qualité d'absorption des plaies de saignements moyens. Assure une bonne protection mécanique. Le voile en non tissé très doux permet d'éviter l'adhérence à la plaie.

**Coussin hémostatique compression** : Dispositif de première urgence, pour stopper toute hémorragie externe, sans pour autant arrêter la circulation du sang.

**Antiseptique** : Substance qui tue ou prévient la croissance des bactéries et des virus (micro-organismes) sur les surfaces externes du corps

### 2. ABREVIATIONS

- GHA : Gel hydro-alcoolique.
- DASRI : Déchets issu de l'Activité de Soins à Risque Infectieux.
- U.U. : Usage Unique.

## D-RESPONSABILITES

	Fonction	Grade - Prénom - Nom
Création	ISP de Groupement Référent Matériel Technico-logisticien de la P.U.I.	Infirmier-chef A.C. LOUVET M.VIE

Page 1 / 4	Service de Santé et de Secours Médical Date de création : 20/12/2012 Version et date de la dernière mise à jour : V2 du 29/03/2013	Visa :
0 annexe		Médecin Chef Col P.GARDET



# TROUSSE DE PREMIERS SECOURS

FICHE MATERIEL  
MEDICO SECOURISTE

FTU MMS 001

Suivi des mises à jour

ISP de Groupement Référent Matériel

Infirmier-chef A.C. LOUVET

## E-DESCRIPTION

<u>QUANTITE</u>	<u>ARTICLE</u>	<u>EMPLACEMENT</u>
1	a. Sacoche	
4	b. Pansement prédécoupé (taille unique)	
1	c. Sac DASRI 20 L	Poche latérale
2	d. Sachet de 5 compresses stériles	
1	e. Couverture de survie	
3	f. GHA	
1	g. Masque bouche à bouche UU	
1	h. Garrot tressé	
1	i. Rouleau de sparadrap	
2	j. Paires de gants latex taille 8/9 UU	Poche latérale
1	k. Paire de ciseaux type Gesco	
3	l. Bande extensible 7 cm	
3	m. Antiseptique type BI SEPTINE®	
1	n. Coussin hémostatique compressif	
1	o. Pansement absorbant	



### F-CONDITIONS D'EMPLOI

#### 1. INDICATION

Dès lors que l'intervenant n'a pas d'autre matériel à disposition, en attente de renfort.

#### 2. CONTRE-INDICATION

Privilégier l'utilisation du sac d'oxygénothérapie dès que possible.


#### 3. UTILISATION DU MASQUE BOUCHE A BOUCHE



Masque emballé



Masque déballé

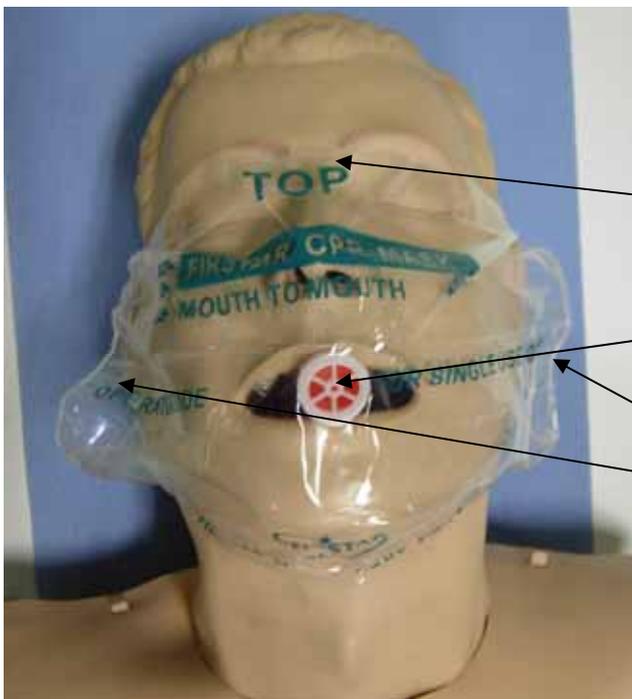

Une fois déballé, positionner le masque comme indiqué :

- « TOP » en Haut
- Pastille rouge du filtre apparente. On doit pouvoir lire « opérator side »
- Placer les élastiques sur le côté derrière les oreilles de la victime.



## TROUSSE DE PREMIERS SECOURS

FICHE MATERIEL  
MEDICO SECOURISTE

FTU MMS 001

### G-VERIFICATION

S'assurer que la sacoche soit complète conformément à description ci dessus. Vérifier les dates de péremption des matériels la composant ainsi que l'intégrité de leur emballage. Les flacons d'antiseptique sont à usage unique. Ils doivent être jetés après utilisation.

### H-NETTOYAGE

La sacoche se nettoie en machine à laver à 40°C maximum.  
Le matériel souillé à usage unique est jeté conformément à la procédure DASRI .  
Les ciseaux Gesco sont nettoyés conformément au protocole de désinfection du petit matériel.

### I -ELIMINATION

Le matériel utilisé sera éliminé conformément à la procédure DASRI .

### F-REAPPROVISIONNEMENT

Le réapprovisionnement de la sacoche se fera par le biais des logistiques de groupements par une demande LSL.

### HISTORIQUE DES MISES A JOUR

Version	Date	Objet et raison de la mise à jour
1	20/12/2012	➤ Création du document.
2	29/03/2013	➤ Mise à jour du document.