

A-OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Ce document est à destination des utilisateurs du Kit de recueil des liquides biologiques.

- Sac Vomitoire
- Urinal Care Bag®
- Bassin Care Bag®

Celui-ci décrit successivement :

- son utilisation.
- les modalités d'élimination.

B-DOCUMENTS ET PROCESSUS DE REFERENCE

1. DOCUMENTS DE REFERENCE

- Classeur Hygiène.
- Article R 1335-1 à R 1335-8 du code de la Santé Publique.
- Fiche laboratoire CareBag®

C-DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

1. DEFINITIONS

Liquides Biologiques : On appelle liquide biologique tout liquide issu de l'organisme (sang, salive et crachat, vomi, sueur, larmes, placenta, liquide amniotique, selles, urines, etc...)

2. ABREVIATIONS

- DASRI : Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux
- FH : Fiche Hygiène.
- VSAV : Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes.

D-RESPONSABILITES

	Fonction	Grade - Prénom - Nom
Création	Infirmier Pôle Paramédical	INC LOUVET Anne-Cécile
	Infirmier Pôle Paramédical	INF BIREMBAUT Benoit
Suivi des mises à jour	Infirmier Pôle Paramédical	INC LOUVET Anne-Cécile

E-DESCRIPTION

L'ensemble des sacs de recueil est équipé d'un dispositif d'absorption anti-odeurs gélifiant les liquides, ils sont à usage unique et munis d'un cordon de serrage.



SAC VOMITOIRE



URINAL CAREBAG®



BASSIN CAREBAG®

F-MODE OPERATOIRE

Sac Vomitoire :



Présenter le sac ouvert à la victime.

Se protéger avec des gants.

Après utilisation, refermer le sac en tirant sur le cordon.

Eliminer le sac dans le sachet DASRI 20 Litres de l'intervention (FH 005).

Urinal CareBag ® :



Présenter le sac ouvert à la victime.

Se protéger avec des gants.

Après utilisation, refermer le sac en tirant sur le cordon.

Eliminer le sac dans le sachet DASRI 20 Litres de l'intervention (FH 005).

Bassin CareBag ® :



Orienter le sac avec les liens au milieu du bassin



Installer le sac sur la partie plate du bassin.

Finir l'installation du sac, du côté de la poignée.


Se protéger avec des gants.

Le bassin doit se glisser sous la victime allongée sur le dos, et la poignée vers l'entre-jambe.



Récupérer le bassin en tirant par la poignée. Rabattre les bords du sac vers l'intérieur.

Tirer sur les cordons pour refermer le sac.

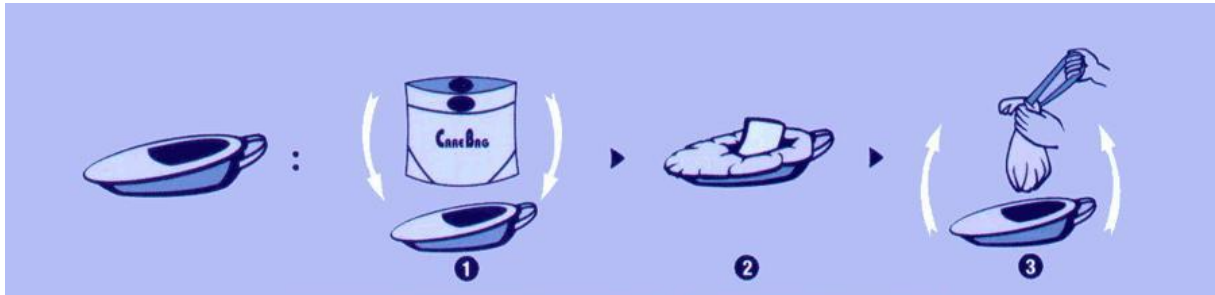

Eliminer le sac dans le sachet DASRI de 20 Litres de l'intervention (FH 005).

A la fin de l'intervention, nettoyer le bassin avec une lingette et le SURFA'SAFE (cf procédure 3 de la FH 001).

DESTINATAIRES

- Tous Intervenants SAP.

HISTORIQUE DES MISES A JOUR

Version	Date	Objet et raison de la mise à jour
1	01/07/2008	➤ Création du document.
2	14/04/2014	➤ Mise à disposition de sacs à usage unique.



Kit de recueil des liquides biologiques

FICHE MATERIEL
MEDICO SECOURISTE

FTU MMS 003

3

14/11/2014

➤ Mise à jour

