



Sac d'intervention Oxygénothérapie VSAV - VPI

FICHE MATERIEL
MEDICO SECOURISTE

FTU MMS 005a

A-OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Cette fiche technique utilisateur est à destination des utilisateurs du sac d'intervention Oxygénothérapie « DECAL-Dimatex »®, en dotation dans les VSAV - VPI. Elle décrit successivement :

- Les caractéristiques techniques du sac et son contenu, et son organisation
- Les modalités de vérification, de nettoyage et de réparation.

B-DOCUMENTS ET PROCESSUS DE REFERENCE

- [FAT Sac d'oxygénothérapie et sac d'intervention secouriste](#)
- [FH 003 : Protocole d'Elimination des Déchets d'Activité de Soins du classeur hygiène](#)
- [FH 009 : Protocole de nettoyage du sac d'intervention Oxygénothérapie et du sac d'intervention secouriste du classeur hygiène](#)

C-DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

1. ABREVIATIONS

- DASRI : Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux
- DSA : Défibrillateur Semi-Automatique
- FH : Fiche Hygiène
- O² : Oxygène
- U.U. : Usage Unique

D-RESPONSABILITES

	Fonction	Grade - Prénom - Nom
Création	ISP de Groupement Référent Matériel BFS	Infirmier-chef A.C. LOUVET Adjudant-Chef Fabrice LABORBE
Suivi des mises à jour	ISP de Groupement	ISL Tiphaine DUPISSOT

E-DESCRIPTION

1. LE SAC

Le sac à dos d'intervention est un sac de rangement pour le matériel d'oxygénothérapie et de premiers secours.

Il est muni :

- d'un dossard type « LAFUMA »
- d'une poignée de portage
- d'une poche centrale avec fourreau de protection (bouteille d'O²)
- de deux poches latérales
- de deux poches frontales



F-CONDITIONS D'EMPLOI

1. INDICATION

Toute intervention de secours à victime.

2. CONTRE-INDICATION

Aucune

3. RANGEMENT

3.1 Poche centrale

- Une bouteille 5L d'oxygène B5



3.2 Poche latérale droite (Adulte)

- 1 sac avec 1 insufflateur manuel adulte à UU + 1 masque TM
- 1 masque T4
- 1 masque d'inhalation à haute concentration adulte
- 1 jeu d'électrodes DSA adulte



3.3 Poche latérale gauche (pédiatrie)

- 1 sac avec 1 insufflateur manuel enfant + 1 masque T3
- 1 masque T2 + 1 masque T1
- 1 masque d'inhalation à haute concentration pédiatrique
- 1 jeu d'électrodes DSA pédiatrique



3.4 Poche avant basse

- 1 pochette bleue contenant :

- 1 canule de GUEDEL Taille 00
- 1 canule de GUEDEL Taille 0
- 1 canule de GUEDEL Taille 1
- 1 canule de GUEDEL Taille 2
- 1 canule de GUEDEL Taille 3
- 1 canule de GUEDEL Taille 4
- 1 embout de contrôle pour aspirateur de mucosités
- 2 sondes d'aspiration buccale CH10
- 2 sondes d'aspiration buccale CH26



3.5 Poche avant haute

- 1 pochette noire contenant :

- 2 sacs DASRI
- 1 paire de lunettes plastiques de protection



G-VERIFICATION

La vérification du sac, des dates de péremption des matériels ainsi que l'intégrité de leur emballage est faite quotidiennement à la prise de garde, lors de la vérification du véhicule et après chaque intervention au cours de laquelle le matériel a été mis en œuvre.



Sac d'intervention Oxygénothérapie VSAV - VPI

FICHE MATERIEL
MEDICO SECOURISTE

FTU MMS 005a

H-NETTOYAGE

[FH 009 : Protocole de nettoyage du sac d'intervention Oxygénothérapie et du sac secouriste du classeur hygiène](#)

I-ELIMINATION

Le matériel utilisé sera éliminé conformément à la [FH 003 : Protocole d'Elimination des Déchets d'Activité de Soins du classeur hygiène](#).

J-REAPPROVISIONNEMENT

Le réapprovisionnement du sac d'oxygénothérapie se fera par le biais des logistiques de groupements par une demande LAL.

Tout sac détérioré ou trop souillé pour être nettoyé selon les protocoles en vigueur, devra être acheminé à la PUI via les logistiques de groupement.

K-HISTORIQUE DES MISES A JOUR

Version	Date	Objet et raison de la mise à jour
1	20/12/2012	➤ Création du document
2	07/07/2015	➤ Mise à jour du document
3	29/03/2016	➤ Modification de l'armement
4	05/01/2017	➤ Modification de l'armement Saturomètre
5	13/12/2018	➤ Ajout du kit glycémie capillaire
6	07/05/2020	➤ Modification de l'armement (dotation dans les VSAV d'un sac intervention secouriste)