



SAC D'INTERVENTION SECOURISTE VSAV / VSSUAP (équipé du DGT7)

FICHE MATERIEL MEDICO
SECOURISTE

FTU MMS 028 b

A- OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Cette fiche technique utilisateur est à destination des utilisateurs du sac d'intervention Secouriste de la marque SYT®, en dotation dans les VSAV / VSSUAP équipés du DGT7. Elle décrit successivement :

- Les caractéristiques techniques du sac, son contenu et son organisation.
- Les modalités de vérification, de nettoyage et de réparation.

B- DOCUMENTS ET PROCESSUS DE REFERENCE

- [Guide SSUAP](#)
- [FAT Sac d'Oxygénothérapie et Sac d'intervention Secouriste](#)
- [Classeur hygiène](#)
- [FTU MMS 031 : Moniteur Défibrillateur Defigard Touch Seven](#)
- [Guide SSSM 002 - Accouchement inopiné et Kit accouchement](#)
- [FAT VSAV](#)

C- DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

ABREVIATIONS

- CHU : Coussin Hémostatique d'Urgence
- DASRI : Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux
- FAT : Fiche Armement-Type
- FH : Fiche Hygiène
- GHA : Gel Hydro-Alcoolique
- GLS : Groupement Logistique Santé
- PLD : Plateforme Logistique Départementale
- U.U. : Usage Unique
- VSAV : Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes
- VSSUAP : Véhicule de Secours et de Soins d'Urgence Aux Personnes

D- RESPONSABILITES

| | Fonction | Grade – Prénom - Nom |
|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Création | Chef du Service Secours Médical | Cadre de santé Commandant Vincent LEBRETON |
| Suivi des mises à jour | GLS/Bureau Logistique BSSUAP/SR | Pharmacienne Cdte Angélique MIGNON AAP1 Fabrice FAIVRE LTN Jérôme ALBERT |

E- DESCRIPTION

1. LE SAC

Le sac à dos d'intervention ou station de travail est destiné au rangement du matériel de premiers secours. Il est muni :

Poignée de treuillage

Poignées de transport



Plaque de protection amovible

Poignées pour le déplacement de la station en version ouverte

Supports tablette de préparation

Emplacements du pied à perfusion (aux 4 coins du sac)



2. LE CONTENU

Cf. [FAT Sac d'Oxygénothérapie et Sac d'intervention Secouriste](#)

F- CONDITIONS D'EMPLOI

1. INDICATION

Toutes interventions de secours à victime.

2. CONTRE - INDICATION

Aucune

3. RANGEMENT

Sous le grand rabat s'ouvrant en premier :

- Un filet zippé transparent contenant :
- 10 paires de gants à U.U.
 - 4 masques FFP2
 - 2 sacs vomitoire
 - 1 GHA

 - 3 fiches bilan
 - Refus de transport

 - Pochette Orange
 - Pochette Rouge
 - Pochette Bleue

Sous le second rabat :

- Pochette Verte
- Pochette Noire

- Tablette de préparation
- 2 sacs DASRI rangés dans le filet



Le pied à perfusion est rangé sous les 5 pochettes dans le fond du sac.

3.1 Pochette orange

- 1 lecteur de glycémie
- 5 auto-piqueurs
- 5 dosettes de chlorure de sodium 5ml
- 2 sachets de 5 compresses
- 1 boîte à aiguilles
- 5 sucres
- 1 sachet de gants
- 1 thermomètre frontal sans contact
- 1 lampe à pupille



3.2 Pochette Rouge

- 4 BISEPTINE®
- 1 couverture de survie
- 1 rouleau de sparadrap
- 2 bandes de 7 cm
- 2 bandes de 10 cm
- 1 paire de ciseaux Jesco
- 5 sachets de 5 compresses
- 2 pansements absorbants type américain



3.3 Pochette bleue

- Kit accouchement
 - 4 clamps de Barr
 - 1 paire de ciseaux à bout ronds
 - 1 manomètre à pression U.U.
 - 1 serviette à usage unique
 - 1 bonnet jersey
 - 1 couverture de survie
 - 1 sac DASRI 20 Litres
 - 1 sac plastique transparent
- 1 sachet de gants
- 5 masques chirurgicaux
- 2 écharpes
- 5 épingles de sécurité



3.4 Pochette verte

- ❑ Kit brûlures
 - 2 compresses brûlure 10 x 10
 - 2 compresses brûlure 20 x 40
- ❑ Kit section de membre
 - 1 sac iso-thermique à U.U
 - 1 sachet de 5 compresses
 - 1 pansement absorbant type américain
 - 2 packs de froid instantané



3.5 Pochette noire

- ❑ Kit hémorragie
 - 3 couvertures de survie
 - 1 pansement compressif à bague de serrage
 - 1 garrot tourniquet Adulte
 - 1 garrot tourniquet Pédiatrique / Adulte
- ❑ 1 CHU
- ❑ 1 sachet de gants



G- VERIFICATION

La vérification du sac et du matériel biomédical qu'il contient, des dates de péremption ainsi que l'intégrité des emballages est faite quotidiennement, lors de la vérification du véhicule à la prise de garde et après chaque intervention au cours de laquelle le matériel a été mis en œuvre.
 Les flacons d'antiseptique (BISEPTINE®) sont à usage unique.
 Les morceaux de sucre doivent être renouvelés tous les ans (l'année devant être indiquée au marqueur sur la pochette type Ziploc® (Ex : en 10/2024 on notera EXP : 10/2025)).



**SAC D'INTERVENTION SECOURISTE
VSAV / VSSUAP
(équipé du DGT7)**

**FICHE MATERIEL MEDICO
SECOURISTE**

FTU MMS 028 b

H- NETTOYAGE

[FH 009 : Protocole de nettoyage des sacs d'intervention Oxygénothérapie - dans le classeur hygiène](#)

I- ELIMINATION

Le matériel utilisé doit être éliminé conformément à la [FH 003 : Protocole d'élimination des Déchets d'activité de soins - dans le classeur hygiène](#)

J- REAPPROVISIONNEMENT

Le réapprovisionnement du sac secouriste s'effectue auprès du GLS via une demande LAL. La livraison se fait par le biais de la tournée GLS/PLD.

Tout sac détérioré ou trop souillé pour être nettoyé, doit être acheminé au GLS pour échange ; ce dernier doit être vide et mis dans un sac hydrosoluble.

K- DESTINATAIRES

- GSS
- GLS
- CIS

L- HISTORIQUE DES MISES A JOUR

| Version | Date | Objet et raison de la mise à jour |
|---------|------------|-----------------------------------|
| 1 | 21/03/2024 | ➤ Création du document |