

# PLATINE DE FIXATION ET SUPPORT DE CHARGE (Touch 7)

Création :  
Avril 2026

Mise à jour



Fiche matériel

V1

## INDICATIONS

Installation du nouvel appareil Schiller Defigard Touch 7 dans les VSAV

## PRESENTATION

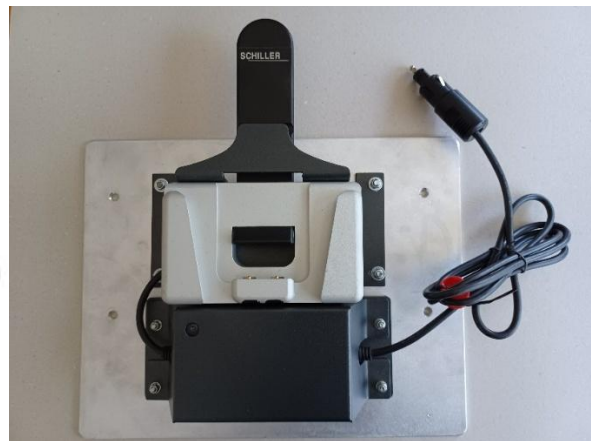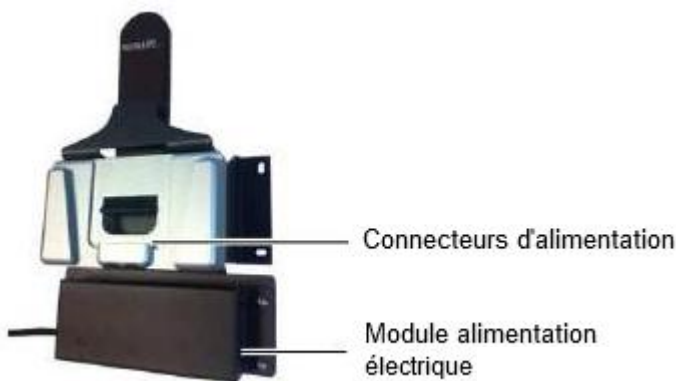


Le support de charge ci-dessus est fourni fixé sur une platine perforée permettant le positionnement sur le rail présent dans le véhicule et un branchement sur une des prises 12 V présente sur la paroi technique. Pour certains VSAV dont le coupe batterie inhibe l'alimentation en 12V, un chargeur 220 V est fourni.

## RISQUES ET CONTRAINTES

Veiller à ce que la prise de rechargement ne soit pas située au-dessus de de l'appareil (risque d'endommager la prise)

## REALISATION

Le remplacement du défibrillateur Lifepack par le nouveau moniteur Schiller est simple :il suffit de dévisser les 4 vis de fixation du support mural (vérifier la présence des 4 coulisseaux dans les rails) et de mettre en place la nouvelle plaque.

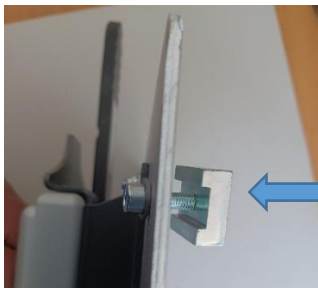


Coulisseau à insérer dans le rail

Si besoin, des coulisseaux pourront être fournis par l'intermédiaire de la compagnie



Positionner la plaque et visser les **4 vis**

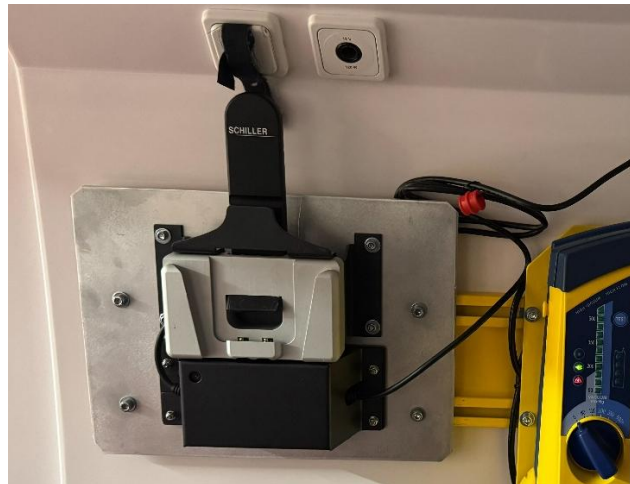

**Avant**

Le moniteur de surveillance pourra être positionné indifféremment à gauche ou à droite du rail en fonction de l'encombrement de la bouteille d'oxygène



**Après**

**Ne pas positionner la prise du chargeur au-dessus de l'appareil** pour éviter les chocs ou le débranchement à chaque utilisation




## Cas particulier : absence de rail



Si aucun rail n'est présent sur la paroi technique, procéder de la manière suivante :

- Désolidariser le support de charge de la platine
- Se servir de la platine comme gabarit de perçage dans la paroi après avoir présenté l'appareil et pris les repères
- Percer les 4 trous de fixation
- Visser les 4 vis avec des rondelles intermédiaires (5x40 mm car trous percés à ce diamètre)

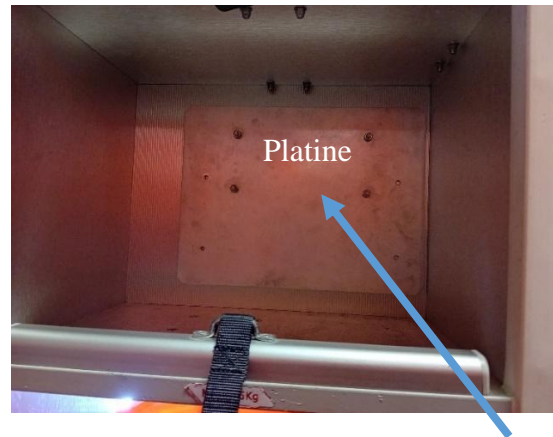

- La platine viendra en renfort de la paroi et sera positionnée en regard du chargeur (intérieur de la porte latérale)
- Le moniteur doit pouvoir être positionné et retiré sans problème (mouvement de retrait vertical)



**En cas de doute et avant perçage de la paroi**, vérifier la faisabilité auprès du parc roulant.

NB : dans ce cas de figure les coulisseaux sont remplacés par des écrous .