

**GARROT TOURNIQUET**

**DIFFUSION : DDSIS, DDASIS, EMO, Médecins et infirmiers de GT, Service formation, Chefs de GPT, Chefs de Centres, Responsables de CI SAMU**

Date de création : 1/08/2011

Date de modification :

Page 1 sur 3

Version n°1


Rédigé par :  
ISP E. MONTAGNER



Validé par :  
Médecin Colonel F. DISSAIT



**DESCRIPTION :**

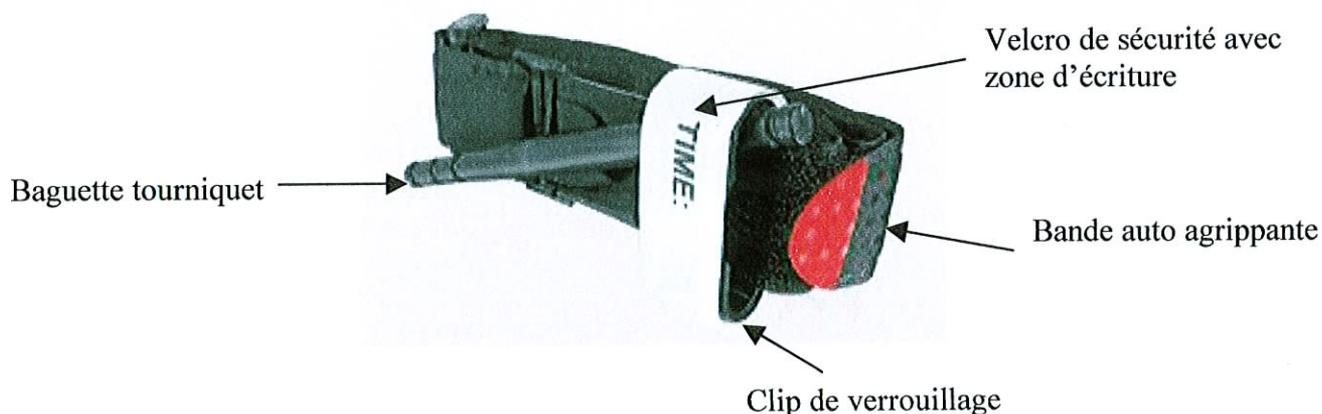

**JUSTIFICATION**

- En exerçant une pression circulaire autour du membre concerné, le garrot interrompt totalement la circulation du sang en aval.


**INDICATION**

- Le garrot est posé au bras ou à la cuisse, si la compression locale est inefficace ou impossible à réaliser du fait du type de lésion, du nombre élevé de victimes, de la position de la victime et / ou lorsque l'accès au blessé est difficile.

**REALISATION**

- Le garrot est mis en place :
  - Pour le membre inférieur, entre la plaie et l'aîne, et dans tous les cas au dessus du genou
  - Pour le membre supérieur, entre la plaie et l'aisselle, et dans tous les cas au dessus du coude.

- Une fois le garrot posé, il ne sera desserré que sur ordre d'un médecin.

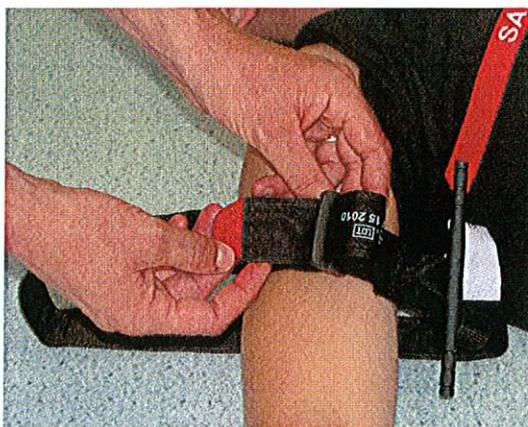

Enfiler la sangle dans la boucle



Ajuster la sangle



Tourner la baguette tourniquet jusqu'à l'arrêt du saignement puis la bloquer dans le clip de verrouillage



Fermer le velcro de sécurité et noter l'heure de pose.

## **EFFICACITE**

- Surveiller l'arrêt complet et permanent du saignement ; le garrot doit rester visible.

## **ENTRETIEN**

- Matériel à usage unique